

器39 歯科用プライヤー

一般医療機器 歯科矯正用プライヤー JMDN33209000

## ワインガルトユーティリティープライヤー

### 【形状・構造及び原理等】

原理 手動式 作業部 柄部

### 【使用目的、効能又は効果】

金属片又はワイヤーを屈曲する為に用いる  
歯科用器具をいう。

### 【操作方法又は使用方法】

回転軸のある2枚の作業部を使用しワイヤー及び金属片の屈曲  
に使用する。

### 【使用上の注意】

- 1) ステンレス素材を使用しているが使用方法、環境等によつては腐食することがあるので以下の使用上の注意を守る事。
- 2) **取り扱いについて**: 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしない事。
- 3) **目的外使用の禁止**: 使用目的(医療行為)以外の目的で使用しないこと。また、破損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えない事。  
許容範囲を超えるサイズのワイヤー等を屈曲切断には使用しない事。
- 4) **加熱の禁止**: 本品は直接火炎にさらさない事。  
加熱すると変形、変色、破損等の原因となる。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1) **保管上の注意**:
  - ・化学薬品と一緒に収納・保管しない事。
  - 滅菌後は水気の無い安全な場所に常温で保管する事。
- 2) **保管者の限定**: 本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する事。

### 【保守・点検に係る事項】

- 1) **使用前・使用後の点検**: 使用前・使用後に、破損、ヒビ、傷、変色、腐食、稼動部の動き等に異常がないか確認する事。  
これらがある場合は使用を中止する事。又、長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換する事。
- 2) **家庭用洗剤の使用禁止**: 家庭用洗剤は金属を腐食させる事があるので、使用しない事。洗浄には歯科器具用防錆洗浄剤を使用する事。
- 3) **機能水の使用禁止**: 超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させる事があるので、使用しない事。

### 【保守・点検に係る事項】

- 1) **使用前・使用後の点検**: 使用前・使用後に、破損、ヒビ、傷、変色、腐食、稼動部の動き等に異常がないか確認する事。  
これらがある場合は使用を中止する事。又、長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換する事。
- 2) **家庭用洗剤の使用禁止**: 家庭用洗剤は金属を腐食させる事があるので、使用しない事。洗浄には歯科器具用防錆洗浄剤を使用する事。
- 3) **機能水の使用禁止**: 超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させる事があるので、使用しない事。
- 4) **洗浄の注意**:
  - ・洗浄後は水分を除去し、充分乾燥させてから保管する事。  
水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。
- 5) **クレンザー(磨き粉)、金属ウール、金ブラシの使用禁止**:  
錆びの原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシは使用しない事。

### 【包装】

各種1個入包装

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名 フジデンタル株式会社  
住所 東京都北区中里2-14-8  
TEL 03-6903-7972

製造業者名 フジデンタル株式会社 13BZ201150  
住所 東京都北区中里2-14-8