

再使用禁止

矯正用エラスティック

【禁忌・禁止】

- ・天然ゴムに対してアレルギーの有る患者には使用しないこと。
- ・再使用禁止


【形状・構造及び原理等】**

1. 概要

本品は、矯正を行う歯に本品（輪ゴム）を引っ掛け、ゴムの張力により歯牙又は口腔内組織を移動させ、歯科矯正治療を行うものである。主に口腔内で歯間に使用するものと、口腔内から歯列矯正用ヘッドギア等の顎外固定装置へ連結する顎外用に大別され、それぞれ寸法及び張力毎に種類がある。張力は5種類あり、小さいものから大きいものへ順にライト、ミディアム、ヘビー、ヘビープラス、エキストラヘビーと表示する。

2. 形状

A : 内径

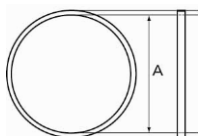

3. 寸法

1) 一般用 (バルク包装品)

張力表示	商品番号		内径 A (mm)	張力 (g)
	(バルク)	(小分)		
ライト	J011039	J-138	7.9±0.4	57±28
ミディアム	J011119	J-130	4.8±0.4	85±28
	J011129	J-131	6.4±0.4	
	J011139	J-132	7.9±0.4	
	J011149	J-136	9.5±0.4	
ヘビー	J011209	J-129	3.2±0.4	99±14
	J011319	J-133	4.8±0.4	128±14
	J011329	J-134	6.4±0.4	
	J011339	J-135	7.9±0.4	
	J011349	J-137	9.5±0.4	

2) 一般 (犬歯間) 用

張力表示	商品番号	内径 A (mm)	張力 (g)
ライト	J01156	15.9±0.4	57±28
	J01157	19.1±0.4	
ヘビー	J01166	15.9±0.4	99±14
	J01167	19.1±0.4	

3) 顎外用

張力表示	商品番号	内径 A (mm)	張力 (g)
ライト	J01171A	4.8±0.2	227±14
	J01172A	6.4±0.2	
	J01173A	7.9±0.2	
	J01174A	9.5±0.2	
	J01175A	12.7±0.2	
ヘビー	J01181A	4.8±0.2	454±14
	J01182A	6.4±0.2	
	J01183A	7.9±0.2	
	J01184A	9.5±0.2	
	J01185A	12.7±0.2	

4. 原理

本品は、ゴムの張力を矯正力として利用することにより、歯牙又は口腔内組織を移動させる。

5. 原材料

天然ゴム

【使用目的又は効果】

本品は、歯列矯正処置による歯牙又は口腔内組織の移動に用いる。

【使用方法等】

本品は、口腔内及び口腔外で使用する。口腔内用は顎内ゴム、顎間ゴムとして歯列矯正用アタッチメント等と併用し、口腔内と口腔外を連結するものは前方牽引ゴムとして、前方牽引装置と併用し、主に歯や歯列弓の移動に使用する。口腔外用はチンキャップ、ヘッドギア等の顎外装置に装着して使用する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起すことがあります。このような症状を起した場合には、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・本品は再使用しないこと。
- ・本品を患者に使用させる場合、歯科医療有資格者が使用方法を指導すること。
- ・本品の製造方法が原因で、包装中に極端に厚さの薄い製品が混入している場合があります。極端に厚さの薄い製品は使用せずに廃棄してください。

【保守・点検に係る事項】

本品はオートクレーブによる滅菌はできません。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温・高湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・専用ポリ袋(商品包材)に入れること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：株式会社 JM Ortho
住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F
電 話 番 号：03-5281-4711
F A X 番 号：03-5281-4716
製 造 業 者：RMO, INC. (アメリカ)
DENTSPLY International Raintree Essix
(アメリカ)