

器 58 整形用機械器具  
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント (41059000)

再使用禁止

エキスパンションスクリュー I

【禁忌・禁止】

- ・ニッケルに対しアレルギーのある患者には使用しないこと。
- ・再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

<原材料> ステンレス鋼

<形状>

標準形状は下図のとおり。

1. スプリング内蔵型

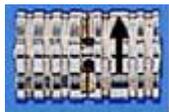

2. スリーディメンション型



3. ピストンスクリュー型



4. テレスコープ型



5. ハイラックス型



・ピストンスプリングスクリュー

商品番号	規格
2004	4.0mm
2006	6.0mm
2008	8.0mm

商品番号	商品名
2009	ポジションホールディングスクリュー
2010	セレイテッドハウジングナット

付属品（薬事非該当）

商品番号	商品名
2012	リーマー
2013	スクリュードライバー

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ・本品の拡大には専用キーを用いること。

【使用上の注意】

1. 使用注意  
戻り防止のため、矢印と逆方向へ回さないこと。
2. 重要な基本的注意
  - ・ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
  - ・本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】\*

- ・開封前は特に指定しないが、外圧がかからないように保管すること。
- ・一度開封した製品は埃、水分等が付かないようにすること。

【製造販売者又は製造業者の氏名又は名称等】\*\*

製造販売者 : 株式会社 JM Ortho  
住所 : 東京都千代田区神田駿河台二丁目2番地  
御茶ノ水杏雲ビル 14F  
電話番号 : 03-5281-4711  
FAX 番号 : 03-5281-4716  
製造業者 : Lewa-Dental Feinmechanik GmbH & Co. KG  
(ドイツ)

【使用目的又は効果】

歯列矯正用

【使用方法等】\*\*

本品は、レジン床に埋め込んだり、アームを有する種類（形状5）は、アームをバンドにろう着させた後、口腔内に装着する。スクリューの中のネジ孔に付属のキーを差し込んで適宜回転させることによって床などを拡大させる。

商品番号毎の拡大量は下表のとおりである。

商品番号	拡大幅 (mm)		商品番号	拡大幅 (mm)	
	最大	1回転		最大	1回転
1016	8.0	0.8	1114-10	5.0	0.9
1017	8.0	0.8	1114-13	9.0	0.9
1018Fa	8.0	0.8	1114-15	11.0	0.9
1019Fa	6.0	0.8	1114-17	13.0	0.9
1110A-15	6.0	0.9	1114-22	18.0	0.9
1110B-13	5.0	0.9	1120	5.0	0.35
1110C-10	3.0	0.9	1120R	5.0	0.35
1110D-9	6.0	0.9	1121	11.0	0.7
1110M-15	11.0	0.9	1121R	6.0	0.7
1110M-17	13.0	0.9	1122	11.0	0.7
1110M-22	18.0	0.9	1122R	6.0	0.7

商品番号	拡大幅 (mm)			
	前方		側方	
	最大	1回転	最大	1回転
3015/3	5.5	0.4	2×3.5	0.4
3016/2	5.5	0.4	7.0	0.8