

器 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント (41059000)
歯科矯正用口くう内補助装置

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ニッケルに対し過敏症のある患者に使用しないこと。
- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 原材料
ステンレス鋼

2. 形状 省略

種類	商品番号
オメガアジャスタブル ストップ	A04124
RM ロック	A00224、A00226、A00227
ラグ/クリート	A00476、A00720
バンドシーティングラグ	A00717、A00718、A00719
シーティングラグ	A00767、A00768
アイレット	A00039
クリンパブルフック	A00129、A00130

【使用目的又は効果】

歯科矯正用

【使用方法等】

形状における種類番号 1)、2)は口腔内に装着されている歯列矯正用ワイヤ等に結合させ、3)～7)は帯環にろう着又は溶接して用いる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1)ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
 - 2)本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
 - 3)万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・開封前は特に指定しないが、外圧がかからないように保管すること。
- ・一度開封した製品は、埃、水分等が付かないようにすること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社 JM Ortho
住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F
電 話 番 号：03-5281-4711
F A X 番 号：03-5281-4716
製 造 業 者：RMO, INC. (アメリカ)