

器 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用ワイヤ (16204000)

オーソノル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

ニッケルに対しアレルギーのある患者には使用しないこと。
本品は再使用しないこと。




【形状・構造及び原理等】

1. 原材料

- 1) ニッケル、チタン
- 2) ステンレス鋼 (コイルスプリングのアイレット部)

2. 形状及び寸法

1) 断面形状及び寸法

断面図	寸法 (mm)	寸法 (インチ)
ラウンド 	0.305, 0.356	0.012, 0.014
	0.406, 0.457	0.016, 0.018
スクエア 	0.406×0.406	0.016×0.016
	0.457×0.457	0.018×0.018
レクタングュラー 	0.406×0.559	0.016×0.022
	0.432×0.635	0.017×0.025
	0.457×0.635	0.018×0.025
	0.483×0.635	0.019×0.025

2) ワイヤ形状と断面寸法 (インチ)

A、アーチフォーム：1)の全種類

B、リバースペクターアーチ：

- .016、
- .018、
- .016×.016、
- .016×.022、
- .017×.025、
- .019×.025

C、ストレートフォーム：

- .016×.022

D、コイルスプリング：線径×コイル内径

コンプレッションスプリング/Open Coil

- .010×.030、
- .012×.030、
- .012×.045

エクステンションスプリング/Closed Coil

☆アイレット付き

- .010×.030、
- .011×.030、
- .012×.030

ディスタライジングスプリング/Stop Wound Coil

- .010×.045

【使用目的又は効果】

歯列矯正用

【使用方法等】

上記Dの内、エクステンションスプリングの最大伸張は全長
9.5mm 品は18mm、12.5mm 品は24mm であるため、各々最大伸張
以内で使用すること。

【使用上の注意】*

1. 重要な基本的注意

- ・ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
- ・本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・万が一、変形や変質をしている製品がある場合には、使用せずに弊社まで御連絡ください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・外圧がかからないように常温保管する。
- ・一度開封した製品は、埃、水分等が付かないようにする。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社 JM Ortho

住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2

御茶ノ水杏雲ビル 14F

電 話 番 号：03-5281-4711

F A X 番 号：03-5281-4716

製 造 業 者：Ultimate Wireforms, Inc. (USA)