

バイオスター チャンバー側部のねじ固定方法

チャンバー側部のねじが緩んでしまった場合、下記の方法で固定してください。

1. ねじを外す

プラスドライバーでねじを外します。



2. ねじのクリーニング

取り外したねじを、アルコールなどを含ませたティッシュでクリーニングします。

しっかりと清掃をしておかないと、ねじを固定するねじ留め剤の効きが悪くなり、外れやすくなります。



3. ねじ穴のクリーニング

アルコールなどを含ませた綿棒(子ども用)を回転させながら挿入し、しっかりとクリーニングします。
その後、新しい(乾燥した)綿棒を回転させながら挿入し、汚れと水分が残らないようにします。



5. ねじ留め剤の塗布


ねじ穴とねじに、ねじ留め剤を塗布します。

！ご注意！

瞬間接着剤は使用しないでください。

ねじのヘッドの摩耗が進行した場合、ねじの交換が必要になりますが、
瞬間接着剤はねじが完全に固着して取り外せなくなります。

ねじ留め剤は、金属ねじ専用かつ取り外し可能なタイプをご用意ください。(例)

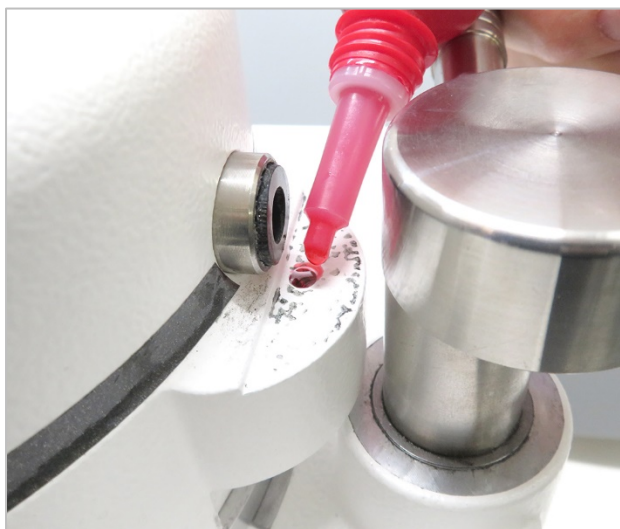


6. ねじの固定

ねじ留め剤が硬化する前にねじを強く締めます。

この時、ドライバーを強く回しすぎるとヘッドの十字穴がなめてしまいやすいので、注意して固定してください。

ねじ留め剤の完全な硬化のため、1 日程お待ちください。（ご帰宅の前などに作業されることをお勧めします。）

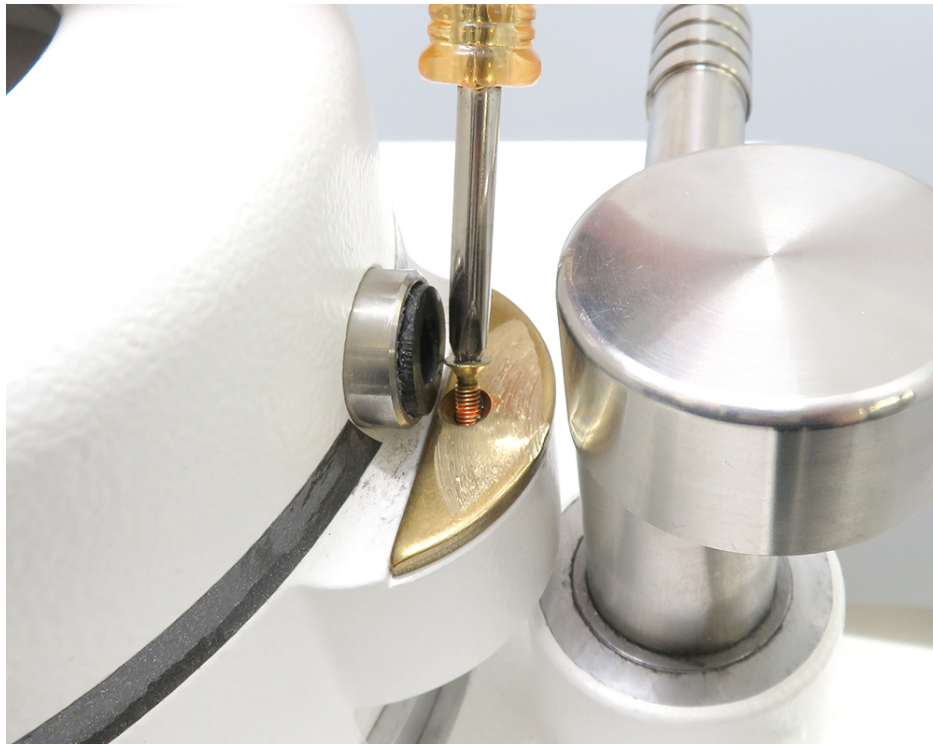

7. シリコングリースの塗布

最後に付属のシリコングリースを塗布したら完了です。

付属のシリコングリースがない場合は、市販の物をご用意ください。



◆ねじや真鍮板が摩耗している場合

交換の際は、お出入りのお取扱店様に下記の商品をご注文ください。

- 商品番号：3110828
- 商品名：ブラススラストピース+スクリュー(各 1 個入)


※個別の販売はございません



◆ゴムパッキンが摩耗している場合

バイオスター購入時に予備として付属されていますが、お手元にならない場合は下記の商品をご注文ください。

- 商品番号：3000856
- 商品名：プレッシャーチャンバー専用ゴムパッキン(3 個入)

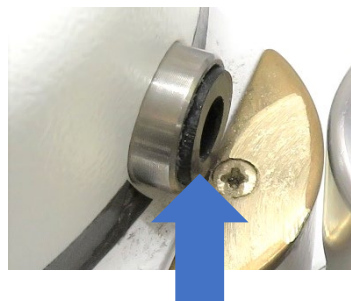

株式会社 JM Ortho

2021.10.13 作成