

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント 41059000

クリスタブレース (クリスタブレース7)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 本品は再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：スタット型

種類：

1. スタンダードツイン
2. スタンダードツインメタルフック付
3. プリトルクツイン
4. プリトルクツインメタルフック付

上記 4 種類にレギュラスロットとゴールドスロットがあり、スロット幅は、0.018 インチと 0.022 インチがある。

材質：

部品名	材 質
本体	ポリアミド樹脂
スロット金具	ステンレス鋼 又は
フック	ステンレス鋼 (金メッキ)

ステンレス鋼の成分：鉄、ニッケル、クロム

【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いる。

【使用方法等】

1. カラーコードのドットをエタノール等でふき取ります。
2. 要移動歯牙、固定歯牙の唇側に歯科矯正用接着材で接着します。ペーストが軟らかい 接着材の使用をおすすめします。
3. 接着材が十分に硬化した後、ワイヤーを装着します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. ボンディングベースが油分等で汚れていると適切な接着力が得られないので、接着前にアルコール等で清潔にすること。
2. 接着材によっては、本品を接着できないものや接着には専用のプライマーが必要なものがあるため、使用する接着材の指示に従うこと。
3. 硬いペーストの接着材を使用する場合は、ベース面の凹部に確実に入り込んでいることを確認すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. 重要な基本的注意
本品の削合や研磨を行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリタデンタルプロダクツ
電話番号 0287-29-2221

[問い合わせ窓口]

株式会社 JM Ortho
電話番号:03-5281-4711 Fax番号:03-5281-4716