

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯列矯正用チンキャップ 41067000

KTチンキャップ

【形状・構造及び原理等】

種類：

| 種類 | 色調 |
|----|------|
| L | アルミ色 |
| S | |

材質：アルミニウム 99.5%以上

【使用目的又は効果】

オトガイに対して後上方に向かう力を加えることができる顎外歯列矯正用器材。

【使用方法等】

1. 本品を顎部にあて適当なヘッドキャップなどの頭部固定装置とゴム紐、あるいはゴムリングにより牽引します。
2. 本品の中央部に小凹をつけてある方を上にして、装着してください。
3. 皮膚刺激を感じる場合は、チンキャップパッド（別売品）をご使用ください。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
 - (1) 本品を使用する際には、アルミニウムに対して発疹、皮膚炎などの過敏症がないことを確認すること。
 - (2) 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. 重要な基本的注意
 - (1) 使用前に本品のバリや損傷の有無を確認すること。
 - (2) 本品は1患者1治療のみに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリタデンタルプロダクツ
電話番号 0287-29-2221

[問い合わせ窓口]

株式会社JM Ortho
電話番号:03-5281-4711 Fax番号:03-5281-4716