

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯列矯正用ヘッドギア 31757000

シンプルリトラクター

【形状・構造及び原理等】

色 調：ブラック
サイズ：S、M、L、LL
付属品：フック、あご紐

【使用目的又は効果】

歯列矯正器具と併用して、口腔外から歯牙又は顎に圧力を加える器具である。

【使用方法等】 *

1. 患者の頭部に装着して使用します。
2. 併用するチンキャップは、KT チンキャップをご使用ください。
3. チンキャップと併用する牽引用ゴムは、別売りのエラスティックをご使用ください。
4. 牽引方向の調整は、エラスティックを治療に適した位置のフックに掛けて行います。
5. 牽引力の調節は、診断に応じてエラスティックなどの数量、サイズで行います。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

1. 就寝時の使用などで、ずれるおそれのあるときは付属のあご紐をつけること。
2. 洗濯の際は中性洗剤で行い、揉み洗いは避けること。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. 重要な基本的注意
 - (1) 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症がないことを確認すること。
 - (2) 本品は 1 患者 1 治療のみに使用すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリタデンタルプロダクツ
電話番号 0287-29-2221

[問い合わせ窓口]

株式会社 JM Ortho
電話番号:03-5281-4711 Fax 番号:03-5281-4716