

機械器具 58 整形用機械器具  
管理医療機器 歯列矯正用スプリング 31797000  
**タイニロイコイルスプリング**

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

1. ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 本品は再使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】**

本品は歯科矯正治療時に使用するコイル状のスプリングである。

形状：オープンコイル

全長：200mm

線径：0.26mm

色調：1. レモンゴールド

2. ピーチゴールド

材質：ニッケル・チタン合金

**【使用目的又は効果】**

歯科矯正治療時の歯牙移動を目的とし、矯正用弾力線をコイル状のスプリングに成形し、そのスプリングの力により歯牙を移動させる。

**【使用方法等】**

矯正治療の際、要移動歯牙に装着されたブラケット、チューブ間に取りついたり、ストップチューブなどと併せて使用する。

**【使用上の注意】**

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)  
本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. 重要な基本的注意
  - (1) 口腔内で本品の削合や研削を行わないこと。
  - (2) 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

**【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売者 株式会社モリタデンタルプロダクツ  
電話番号 0287-29-2221

**【問い合わせ窓口】**

株式会社 JM Ortho  
電話番号:03-5281-4711 Fax 番号:03-5281-4716