

## 機械器具58 整形用機械器具

管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント 41059000

## クリアスナップ

## 再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

本品は再使用しないこと。

## 【形状・構造及び原理等】

形状：



種類：本品は次の種類がある。

## ①ロスタイプ

- |                |         |
|----------------|---------|
| 1) 上顎右側中切歯     | (U 1 R) |
| 2) 上顎左側中切歯     | (U 1 L) |
| 3) 上顎右側側切歯     | (U 2 R) |
| 4) 上顎左側側切歯     | (U 2 L) |
| 5) 上顎右側犬歯      | (U 3 R) |
| 6) 上顎左側犬歯      | (U 3 L) |
| 7) 上顎小臼歯       | (U 4,5) |
| 8) 下顎切歯        | (L 1,2) |
| 9) 下顎右側犬歯      | (L 3 R) |
| 10) 下顎左側犬歯     | (L 3 L) |
| 11) 下顎小臼歯      | (L 4,5) |
| 12) 上顎右側犬歯フック付 | (U 3 R) |
| 13) 上顎左側犬歯フック付 | (U 3 L) |
| 14) 下顎右側犬歯フック付 | (L 3 R) |
| 15) 下顎左側犬歯フック付 | (L 3 L) |

## ②スタンダードタイプ

- |                |
|----------------|
| 16) スタンダード     |
| 17) スタンダードフック付 |

材質:ポリオキシメチレン

## 【使用目的又は効果】

歯科矯正用ブラケットに通した歯科矯正用ワイヤーの保持・固定。  
着脱が容易で、嵌め込み被膜タイプで結紮を不要とする。

## 【使用方法等】

- クリスタブレース、クリアブラケット又はメタルブラケット（歯科矯正用ブラケット）を歯面に接着し、矯正用ワイヤーを挿入して下さい。
- その後、本品をクリスタブレース、クリアブラケット又はメタルブラケットの歯茎側ウイング裏側に先に引掛け、切端側ウイングの上から嵌め込んで、外れないように、しっかり装着して下さい。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 本品はモリタデンタルプロダクツ製クリスタブレース、クリアブラケット及びメタルブラケット専用です。他社のブラケットに使用すると、使用中に外れたり、折れ曲がるおそれがあるので使用しないこと。
- 本品はブラケットに一度嵌め込むと簡単に外れないため、装着する部位を十分確認してから装着すること。取り外す場合は、カッターなどを用いて、ブラケットのスロット上で慎重に切断すること。
- 本品は通常の結紮と違い、ワイヤーがブラケット及びチューブ内に固定されないため、ワイヤーの両端が抜けないように、また先端が粘膜を傷つけないように十分なエンド処理を行うこと。特に直径0.3mm(0.012")以下の細いワイヤーを使用する場合は注意すること。

- 本品はニッケルチタン製の細い丸線をブラケットへ保持する際に、摩擦抵抗を非常に少なくするという特性がある。ただし、ニッケルチタン製の太い丸線及び角線などを使用した場合やその他の材質のワイヤーを使用した場合は、その限りではないので注意すること。

## 【使用上の注意】

- 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）  
本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 重要な基本的注意  
口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリタデンタルプロダクツ  
電話番号 0287-29-2221

[問い合わせ窓口]

株式会社JM Ortho  
電話番号:03-5281-4711 Fax番号:03-5281-4716