

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント 41059000

クリスタブレース (クリスタブレース F)

再使用禁止

【禁忌・禁止】*

- (1) 本品を使用してアレルギー反応を発症した患者には使用しないこと。
- (2) 再使用しないこと [感染予防のため]。

- 本品の削合や研磨を行わないこと。
- 【使用方法等】に記載されていない使い方による不具合の発生は、全て術者の責任となります。

【形状・構造及び原理等】

形状：スタッド型

種類：

1. スタンダードツイン
2. スタンダードツインメタルフック付
3. プリトルクツイン
4. プリトルクツインメタルフック付

上記 4 種類にレギュラスロットとゴールドスロットがあり、スロット幅は、0.018 インチと 0.022 インチがある。

材質：

部品名	材質
本体	ポリアミド樹脂
スロット金具	ステンレス鋼 又は
フック	ステンレス鋼 (金メッキ)

ステンレス鋼の成分：鉄、ニッケル、クロム

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタデンタルプロダクツ

電話番号：0287-29-2221

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社 JM Ortho

電話番号：03-5281-4711

F a x 番号：03-5281-4716

【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いる。

【使用方法等】

1. カラーコードのドットをエタノール等でふき取ります。
2. 要移動歯牙、固定歯牙の唇側に歯科矯正用接着材で接着します。ペーストが軟らかい接着材の使用をおすすめします。
3. 接着材が十分に硬化した後、ワイヤーを装着します。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

1. ボンディングベースが油分等で汚れていると適切な接着力が得られないので、接着前にアルコール等で清潔にすること。
2. 接着材によっては、本品を接着できないものや接着には専用のプライマーが必要なものがあるため、使用する接着材の指示に従うこと。
3. 硬いペーストの接着材を使用する場合は、ベース面の凹部に確実に入り込んでいることを確認すること。

【使用上の注意】*

[重要な基本的注意]

- ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症がある患者には使用しないこと。
- 本品の使用により患者がアレルギー症状を発症した場合は、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。
- 本品は再使用しないこと。
- 口腔内での脱落は、誤飲・誤嚥につながる可能性があるため、施術の際は細心の注意を払って行うこと。
- 本品は、記載の使用目的以外には使用しないこと。
- 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。