

機械器具 58 整形用機械器具  
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント 41059000  
**クリスタボタン**

再使用禁止

---

**【禁忌・禁止】**

本品は再使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】**

種類: 本品は、次の1種類である。  
クリスタボタン

材質: ポリアミド樹脂

**【使用目的又は効果】**

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いる。

**【使用方法等】**

1. 使用する接着材の指示に従って、歯面に接着してください。
2. 接着材が十分に硬化した後、ワイヤー又はエラスティックチェーンを装着します。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

1. ボンディングベースが油分などで汚れていると適切な接着力が得られないので注意すること。
2. 接着材によっては、本品を接着できないものや接着には専用のプライマーが必要なものがあるので、使用する接着材の指示に従うこと。
3. クリスタボタン本体のスロット(孔)部やエラスティックチェーン用にカットしてある裾部に接着材が入らないように注意すること。

**【使用上の注意】**

1. 使用注意 (次の患者には慎重に適用すること)  
本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断をうけさせること。
2. 重要な基本的注意  
口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 株式会社モリタデンタルプロダクツ  
電話番号 0287-29-2221

[問い合わせ窓口]

株式会社 JM Ortho  
電話番号:03-5281-4711 Fax 番号:03-5281-4716