

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント 41059000

メタルブラケット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 本品は再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

種類：本品は、次の種類がある。

1. スタンダード
2. スタンダードフック付
3. プリトルク
4. プリトルクフック付

材質：本品は、次の材質で構成する。

部品名	材 質
本体	ステンレス鋼
フック	
ベース	
ろう材	16K 金ろう

ステンレス鋼の主成分
ニッケル、クロム、鉄

16K 金ろうの成分
金、銀、銅、亜鉛、ニッケル、インジウム

【使用目的又は効果】

歯科矯正治療時の歯列移動、歯牙固定に用いるブラケットである。

【使用方法等】

1. タイウイングのドットマークをエタノール等でふき取る。
2. 固定歯牙の唇側面に歯科矯正用接着材で接着する。
3. スロットにワイヤーを挿入し、ウイングにリガチャーワイヤー等で結紮、固定し使用する。
4. フックは移動方向、移動角度が必要な矯正治療に応じ、ゴム等をフッキングし使用する。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

1. 使用する接着材の指示に従って、歯面に接着すること。
2. ボンディングベースが油分等で汚れていると適切な接着力が得られないので、接着前にアルコール等で清潔にすること。
3. プリトルクタイプの場合には、ドットマークを目安に方向を確認してから歯面に位置決めすること。
4. 接着材が十分に硬化した後、ワイヤーを装着すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. 重要な基本的注意
 - (1) 口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。
 - (2) 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリタデンタルプロダクツ
電話番号 0287-29-2221

[問い合わせ窓口]

株式会社 JM Ortho
電話番号:03-5281-4711 Fax番号:03-5281-4716