

歯科材料 01 歯科用金属  
管理医療機器 歯科用銀ろう 70779000

**再使用禁止****オーソソルダーII****【禁忌・禁止】**

- (1) 再使用禁止
- (2) 含有金属に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には、使用しないこと

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 株式会社モリタデンタルプロダクツ  
電話番号 0287-29-2221

**【形状・構造及び原理等】**

形状：線状

寸法（標準）：φ0.5mm  
φ0.6mm

成分：下記の通り

成分	重量%
銀	56
銅	22
亜鉛	17
錫	5

該当規格：JIST6111:2011「歯科用銀ろう」  
液相点：650℃

**<適用合金>**

ニッケルクロム合金、コバルトクロム合金、18-8 ステンレス鋼  
銀合金(固相点 700℃以上)

**<適用フラックス>**

歯科用フラックス

**【使用目的又は効果】**

歯科補綴物又は装置をろう付けすることに用いる。

**【使用方法等】**

1. 流ろうする部分へは予め軽く炎をあててからフラックスを塗布してください。
2. まず、ろうが溶ける程度の弱い炎で流ろうし、次に強い炎を数秒与えますと、より強固なろう付ができます。

**[使用方法等に関連する使用上の注意]**

1. ろう付作業中は換気に十分注意するとともに保護めがねを使用して目を保護すること。また、作業終了後は速やかに洗面、洗眼、うがいなどを行いフラックスによる汚染を除くこと。
2. フラックスは歯科用フラックスを使用すること。
3. 歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。
4. オーバーヒートは、本品の性能が損なわれるため、十分注意すること。

**【使用上の注意】**

1. 禁忌・禁止
  - (1) 本品を使用する際には、銀ろうに対して発疹、皮膚炎過敏症がないことを確認すること。
  - (2) 本品は再使用しないこと。
2. 重要な基本的注意
  - (1) 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
  - (2) 口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。
  - (3) 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】****[保管方法]**

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**[問い合わせ窓口]**

株式会社 JM Ortho  
電話番号:03-5281-4711 Fax 番号:03-5281-4716