

**BCT プライヤー****【禁忌・禁止】**

- ・器具の形態変更や改造等はしないこと。
- ・器具を落下させないこと。また、強い衝撃を与えないこと。

**【形状・構造及び原理等】**

## 1. 概要


本品は歯面に接着されている A-Line(※1) を保持し、除去するために用いる器具である。

※1 販売名「BCT セラミックブラケット」

認証番号：301AKBZX00035000

製造販売業者：株式会社 JM Ortho

## 2. 形状、構造

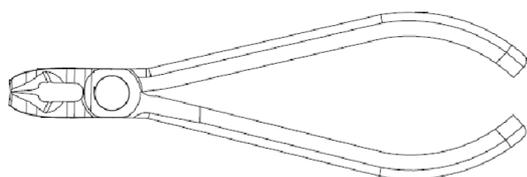

## 3. 原材料

ステンレススティール

**【使用目的又は効果】**

本品は、歯面に接着された歯列矯正用アタッチメントを撤去するために用いる。

**【使用方法等】**

先端部刃先をブラケットベース下部と接着歯面の間に入れ、ハンドルを握りブラケットを外す。

**【使用上の注意】**

<重要な基本的注意>

- ・本品の使用により患者がアレルギー症状を発症した場合は、直ちに使用を中止し、専門家の診断をうけさせること。
- ・使用前に必ず洗浄、滅菌すること。
- ・製品に変形等の異常がある場合には使用しないこと。
- ・患者の口腔内を傷つける可能性があるため過度な力を加えないこと。
- ・洗浄、滅菌および消毒にあたっては使用する機器や薬液の取扱説明書の指示に従うこと。
- ・本品を廃棄する場合には、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

- ・外圧がかからないように保管すること。
- ・埃、水分等が付かないように保管すること。
- ・使用後は洗浄および滅菌し、直射日光・紫外線を避けて室温で衛生的に乾燥保管すること。
- ・歯科医療有資格者以外の者が触れないよう適切に保管、管理すること。

**【保守・点検に係る事項】**

<洗浄方法>

- ・洗浄前に水分、付着物等を使い捨てのペーパータオルで拭き取る。
- ・中性洗剤を使って手洗いもしくは柔らかいブラシで清掃する。または、超音波洗浄器を使用する。
- ・きれいな水で十分すすぎ、乾燥させる。特にヒンジ部分は念入りに乾かしてください。
- ・研磨剤や金属ブラシは使用しないでください。

<滅菌方法>

- ・オートクレーブ滅菌(135°C/3分)
- ・必要に応じて、滅菌前に、ヒンジ部分に医療用の潤滑油を塗布してください。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社 JM Ortho

住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2  
御茶ノ水杏雲ビル 14F

電話番号：03-5281-4711

FAX 番号：03-5281-4716

製造業者：BIOCTEC CO., Ltd. (韓国)