

歯科矯正用バンド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本品の原材料に対して過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】** *

1. 概要

本品は、ステンレス製の金属環である。歯列矯正用アタッチメントを歯牙に固定するために用い、歯牙の部位及びサイズ毎に多種類がある。また、本品包装には、単品及びキット品がある。

2. 形状

標準形状は下図のとおり。



本品は、大臼歯用、小臼歯用がある。
大臼歯用は、上顎・下顎ともに左右それぞれあり、小臼歯用は、上顎・下顎ともに左右共通である。

3. 原材料

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科矯正用

【使用方法等】

本品に歯列矯正用チューブ、アタッチメントを溶接又はろう着した後、歯牙に被せ固定する。

【使用上の注意】** *

<重要な基本的注意>

- ・万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。
- ・本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・ご使用前にバンド側面に印字されている部位マークをご確認ください。

【保管方法及び有効期間等】** *

- ・外圧がかからないように保管すること。
- ・直射日光・紫外線を避けて、常温にて乾燥保管すること。
- ・埃、水分等が付かないように保管すること。
- ・歯科医療有資格者以外の者が触れないよう適切に保管、管理すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】** *

製造販売業者：株式会社 JM Ortho

住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F

電話 番 号：03-5281-4711

F A X 番 号：03-5281-4716

製 造 業 者：OrthoAmerica Holdings, LLC DBA: RMO DBA:
Tangent Orthodontics(アメリカ合衆国)