

機械器具58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科矯正用バンドプッシャー (31801000)
バンドプッシャー

【形状・構造及び原理等】*

1. 概要

本品は、棒状構造を持つ手動器具である。歯列矯正用帯環を装着する際、本品の片側端を帯環に押し付けて適合させる。

2. 原材料

ステンレス鋼、熱可塑性ポリウレタン (TPU) (※1)

※1：商品番号 I00064 バイトブロック部分
商品番号 I00065 交換用バイトブロック

【使用目的又は効果】

金属帯環を歯の位置に合わせ、適合させるために用いる。

【使用方法等】

歯列矯正用帯環 (バンド) を歯牙に装着する際、本品端の金属面をバンドに押し付け、バンドを歯牙に適合させる。

【使用上の注意】**

<重要な基本的注意>

- ・万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。
- ・本品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないこと。

【保管方法及び有効期間等】**

- ・埃、水分等がつかないように乾燥保管すること。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外の者が触れないように適切に保管、管理すること

【保守・点検に係る事項】**

- ・使用前に必ず点検し、洗浄し、滅菌すること。
- ・本品の金属部分はオートクレーブ滅菌が可能。
推奨滅菌条件：20分/121℃又は10分/132℃
樹脂部分は乾熱/オートクレーブ滅菌しないこと。
- ・190℃以上に加熱しないこと。
- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。
- ・滅菌にフェノールは使用しないこと。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- ・滅菌前に、必ず潤滑油を塗ること。
- ・滅菌後、水分は拭き取り乾燥させること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】***

製造販売業者：株式会社 JM Ortho
住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F
電 話 番 号：03-5281-4711
F A X 番 号：03-5281-4716
製 造 業 者：OrthoAmerica Holdings, LLC DBA: RMO DBA:
Tangent Orthodontics(アメリカ合衆国)