

バイオクリルC

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本品の原材料に対して過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、歯科用装置(リテーナー、スプリント、矯正床装置)の作製に用いるプラスチック板である。歯科技工用成型器により成形して使用する。

2. 形状

標準形状は図のとおり。

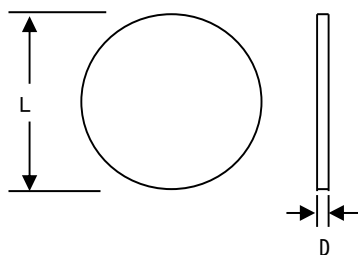

L (直径) : 125.0mm
D (厚さ) : 2.0、3.0mm

3. 原材料

ポリメタクリル酸メチル成形用及び押出用材料、法定色素

【使用目的又は効果】

歯科用装置(リテーナー、スプリント、矯正床装置)の作製

【使用方法等】 **

1. 歯科技工用成型器として、Scheu Dental 社製のバイオスター(※1)又はミニスター(※2)を使用する場合。
 - 1) 成型器の使用・操作方法に従って、直径125mmの本品を成型器にセットする。
 - 2) 石膏模型を成型器にセットする。
 - 3) セットした製品固有のCODE(※3)を入力する。又は成型器にバーコード(※3)を読み取らせ、成形条件(加熱時間と冷却時間)を設定する。
 - 4) 本品を加熱した後、加圧成形する。
 - 5) 冷却後、模型から成形品を取り外し、余剰部分をトリミングする。
 - 6) 辺縁等を仕上げ、装置が完成する。

※1 販売名「バイオスターVII」(届出番号: 13B2X00107000040)
製造販売業者: 株式会社 JM Ortho

※2 販売名「ミニスターS scan II」(届出番号 27B1X00109000325)
製造販売業者: 株式会社モリタ

※3 成形条件を示す3桁のCODEとバーコードは本品表面に印字されている。また、CODE、加熱時間、冷却時間は包装ラベルに表示されている。

2. 1. で指定した歯科技工用成型器以外を使用する場合

- 1) 使用する成型器に本品の直径が適合するのを確認し、セットする。
- 2) 石膏模型を成型器にセットする。
- 3) 成型器に使用方法・操作方法に従って加圧成形を行う。
- 4) 以下は1.の5)と6)と同様。

【使用上の注意】 **

<重要な基本的注意>

- ・本品の使用により発疹などのアレルギー反応があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・万が一、製品に変形等の異常がある場合には使用しないこと。
- ・本品は稀に成形品に気泡が生じる場合がある。対策として使用前に予備乾燥を行うこと。乾燥の際は熱変形に注意すること。(推奨条件: 約70~80°Cの恒温槽で、7~8時間)
- ・成形は使用する成型器の取扱説明書に従って行うこと。
- ・3Dプリンタで作製した模型に対して使用する場合は、模型を十分に重合乾燥させてから使用すること。また、分離用シートの使用を推奨する。(推奨: イソフォランオイル/Scheu Dental 社製)
- ・成形の際は過加熱に注意すること。
- ・成形は風通しの良い場所で行うこと。
- ・熱変形防止のため、本品から作製した装置は熱湯消毒しないこと。ぬるま湯ですすぐ又はリテーナー洗浄剤等を使用すること。
- ・本品を廃棄する場合には、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】 *

- ・熱風及び熱源付近を避けて、開封後は常温乾燥保管すること。
- ・開封した製品は、埃、水分等が付かないようにすること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 JM Ortho
住 所: 東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F
電 話 番 号: 03-5281-4711
F A X 番 号: 03-5281-4716
製 造 業 者: Scheu Dental GmbH (ドイツ)