

2021年 7月 (第6版)
2018年11月 (第5版)

認証番号 220AIBZX00062000
承認番号 21800BZX10049000

種別 : 管理医療機器

機械器具 03 医療用消毒器(診療施設用機械装置)

ホルムアルデヒドガス消毒器 JMDMコード:70472000

「ホルステリ20RM」の付属品 「ホルステリ12RM」の付属品

再使用禁止 ホルステリデンタル専用中和液／ホルステリデンタル専用消臭液

【 禁忌・禁止 】

<使用方法>

- 中和液はアルカリ性で目や皮膚に付着すると炎症を起こす危険性があるため、直接素手で取り扱わないこと。
- ガス化した中和液を多量に吸気すると呼吸困難や咽頭炎を引き起こす危険性があるため、取扱には十分注意すること。

【 形状・構造及び原理等 】

<形状>

- 中和液:赤色の液体でアルカリ性(主成分:アンモニア)
- 消臭液:緑色の液体で酸性(主成分:リンゴ酸)

<包装形状>

- 中和液・5本と消臭液・5本セット/箱

【 使用目的又は効果 】

- ホルムアルデヒドガス消毒装置より排気されるホルムアルデヒドガスを中和し消臭する。

【 使用方法等 】

- 本体付属の取扱説明書を参照し、正しい場所に正しくセットして下さい。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 中和液・消臭液は、使用期限を過ぎた物は使用しないで下さい。
- 中和液・消臭液の色素は、識別し易くするために着色しており、色落ち等が有りましても効果は変わりません。

【 使用上の注意 】

<重要な基本的注意>

- 安全データシートを確認し御使用下さい。
- 法的有資格者以外は取り扱わないこと。

□中和液に関して

- 目や皮膚に付着すると炎症の危険があるので注意すること。
- ガスを大量に吸引すると、呼吸困難や咽頭炎の危険があるので注意すること。
- 薬液の取扱いは、保護マスク、保護メガネ、防水性の手袋を着用すること。
- 薬液が目に入った場合や皮膚に触れてしまった場合は、大量の水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けること。
- 吸引した場合は、直ちに新鮮な空気のある場所に移動し、必要に応じて酸素吸入を行い、医師の診断を受けること。

□消臭液に関して

- 薬液の取扱いは、保護マスク、保護メガネ、防水性の手袋を着用すること。
- 薬液が目に入った場合や皮膚に触れてしまった場合は、大量の水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けること。

【 取扱い上の注意 】

<運搬時等の注意>

- 液漏れの原因となりますので、容器の個別運搬の際は、容器を逆さまにしての運搬はしないで下さい。
- キャップの緩み等の原因となりますので、運搬時の過度な振動に注意して下さい。

【 保管方法及び有効期間等 】

<保管の条件>

- 高温、多湿、直射日光を避け、室温で暗所に保管すること。

<有効期間>

- 適切な保存方法で製造より1年間「自己認証データによる」。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

- 株式会社アスカメディカル
〒536-0008
大阪府大阪市城東区関目2丁目12番10号
電話:06-6939-3011
URL:<https://www.asukamedical.co.jp>

取扱説明書を必ずご参照願います。