

再使用禁止

## 歯列矯正用ステンレスクラスプ

### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本品の原材料に対して過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】\*

#### 1. 概要

本品は、歯科の矯正材料として用いるステンレス鋼製のクラスプである。可撤式の矯正装置を口腔内に保持するために用いる。

#### 2. 形状

ボールクラスプ、アダムスクラスプの2種類の形状がある。

##### 1) ボールクラスプ

下図のように、軸となるワイヤーの先端にボール状の構造物を持つクラスプである。

この先端形状を歯間空隙に適合させて用いる。



##### 2) アダムスクラスプ

2つの突き出した形状を臼歯の頬側近遠心のアンダーカットに適合させて用いる。



#### 3. 原理

口腔内で可撤式矯正装置を装着する際、本品の形状が鉤となって保定する。

#### 4. 原材料

ステンレス鋼

- ・ボールクラスプ(鉄、クロム、ニッケル、マンガン、ケイ素、炭素、リン、硫黄、窒素)
- ・アダムスクラスプ(鉄、クロム、マンガン、モリブデン、ケイ素、窒素、ニッケル、バナジウム、炭素、リン、硫黄)

### 【使用目的又は効果】

可撤式の矯正装置を歯等に維持するために用いる。

### 【使用方法等】

1. 作業用模型の歯間空隙や、歯面に適合するように本品の形状を調節し、脚部を口蓋方向へ屈曲する。
2. 必要に応じて脚部を適切な長さに切断し、先端をレジン床の固定部(アンカー)になるようにループ状もしくは鉤状に曲げる。
3. 通法により、アクリル系レジンを充填し、脚部を固定する。

### 【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・本品に異常が有る場合は、使用せずに製造販売業者へ連絡すること。

### 【保管方法及び有効期間等】\*\* \*

- ・直射日光・紫外線を避けて、常温にて乾燥保管すること。
- ・埃、水分等が付かないように保管すること。
- ・外圧がかからないように保管すること。
- ・歯科医療有資格者以外の者が触れないよう適切に保管、管理すること。

### 【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】\*\* \*

製造販売業者：株式会社 JM Ortho

住所：東京都千代田区神田駿河台 2-2

御茶ノ水杏雲ビル 14F

電話番号：03-5281-4711

FAX 番号：03-5281-4716

製造業者：SCHEU-DENTAL GmbH (ドイツ)