

再使用禁止

矯正用エラスティック

【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止
- ・本品の原材料に対して過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】**

1. 概要

本品は、矯正を行う歯に本品（輪ゴム）を引っ掛け、ゴムの張力により歯牙又は口腔内組織を移動させ、歯科矯正治療を行うものである。主に口腔内で歯間に使用するものと、口腔内から歯列矯正用ヘッドギア等の顎外固定装置へ連結する顎外用に大別され、それぞれ寸法及び張力毎に種類がある。張力は3種類あり、小さいものから大きいもの順にライト、ミディアム、ヘビーと表示する。

2. 形状、寸法

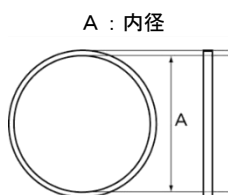

1) 顎間用

張力表示	内径 A (mm)	張力 (g)	
ライト	7.9	57	
ミディアム	4.8	85	
	6.4		
	7.9		
	9.5		
ヘビー	3.2	99	
	4.8		
	6.4		128
	7.9		
9.5			

2) 顎外用

張力表示	内径 A (mm)	張力 (g)
ライト	9.5	227
ヘビー	4.8	454
	6.4	
	7.9	
	9.5	
	12.7	

3. 原理

本品は、ゴムの張力を矯正力として利用することにより、歯牙又は口腔内組織を移動させる。

4. 原材料

天然ゴムラテックス、イオウ、酸化亜鉛、その他添加剤

【使用目的又は効果】

本品は、歯列矯正処置による歯牙又は口腔内組織の移動に用いる。

【使用方法等】

本品は、口腔内及び口腔外で使用する。口腔内用は顎内ゴム、顎間ゴムとして歯列矯正用アタッチメント等と併用し、口腔内と口腔外を連結するものは前方牽引ゴムとして、前方牽引装置と併用し、主に歯や歯列弓の移動に使用する。口腔外用はチンキャップ、ヘッドギア等の顎外装置に装着して使用する。

【使用上の注意】**

<重要な基本的注意>

- ・本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・本品を患者に使用させる場合、歯科医療有資格者が使用方法を指導すること。
- ・原材料の性質と製造プロセスの都合上、極端に厚さの不均一な製品や変形した製品が混入していることがあります。その場合は使用せずに廃棄してください。

【保守・点検に係る事項】

本品はオートクレーブによる滅菌はできません。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光・紫外線を避けて、常温にて乾燥保管すること。
- ・専用ポリ袋(商品包材)に入れること。
- ・歯科医療有資格者以外の者が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社 JM Ortho
住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F
電 話 番 号：03-5281-4711
F A X 番 号：03-5281-4716
製 造 業 者：Ortho America Holdings DBA: RMO and Tangent
Orthodontics (アメリカ合衆国)