

FLI ツインブラケット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本品の原材料に対して過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】*

1. 概要


本品は、ステンレス製の歯列矯正装置であり、歯面に接着させてワイヤを装着し歯牙に矯正力を与える。

2. 形状

本品の形状は、1種類のテクニック(MBT)で2種類のスロットサイズ(0.0182、0.0222インチ)がある。

1) 形状

代表的形状を下図に示す。

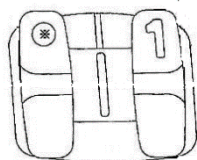

※カラーマーク表示部位

2) 角度

標準角度は下表のとおり。

種類名 MBTタイプ

顎	部位	トルク	アンギュレーション
上	中切歯	17°	4°
	側切歯	10°	8°
	犬歯	-7°	8°
	小臼歯	-7°	0°
下	前歯	-6°	0°
	犬歯	-6°	3°
	第一小臼歯	-12°	2°
	第二小臼歯	-12°	2°

3. 原理

本品は歯面に接着した後、主としてスロットに装着する歯列矯正用ワイヤ等により加えられる力を矯正力として歯牙に伝える。

4. 原材料

- ・ステンレス鋼
- ・着色剤等

【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いる。

【使用方法等】

1. 本品ベース面に接着材を塗布し歯面に接着する。
2. 接着材が充分に硬化した後、歯列矯正用ワイヤ等を本品スロットに装着する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ・使用する接着剤の指示に従って歯面に接着すること。
- ・ボンディングベースが油分等で汚れていると適切な接着力が得られないため、使用前に確認すること。
- ・本品表面中央部のカラーマークは、2)の歯列矯正用ワイヤ等を本品スロットに装着する前に研磨剤・溶剤等を用いて除去すること。

【使用上の注意】**

<重要な基本的注意>

- ・万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。
- ・本品接着前の歯面は汚れを除去しておくこと。
- ・誤飲に注意すること。
- ・本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】**

- ・外圧がかからないように保管すること。
- ・直射日光・紫外線を避けて、常温にて乾燥保管すること。
- ・埃、水分等が付かないように保管すること。
- ・歯科医療有資格者以外の者が触れないよう適切に保管、管理すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社 JM Ortho
住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F
電 話 番 号：03-5281-4711
F A X 番 号：03-5281-4716
製 造 業 者：OrthoAmerica Holdings, LLC DBA: RMO DBA:
Tangent Orthodontics (アメリカ合衆国)