

歯科材料 03 義歯床材料  
管理医療機器 義歯床用熱可塑性レジン (70825000)  
**ハードキャスト**

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

- ・再使用禁止
- ・本品の原材料に対して過敏症の既往歴がある場合には使用しないこと。


**【形状・構造及び原理等】**

1. 概要

本品は、歯科用装置(コーピング、テンポラリークラウンまたはブリッジ用印象)の作製に用いるプラスチック板である。歯科技工用成型器により、成形して使用する。

2. 形状

標準形状は下図のとおり。

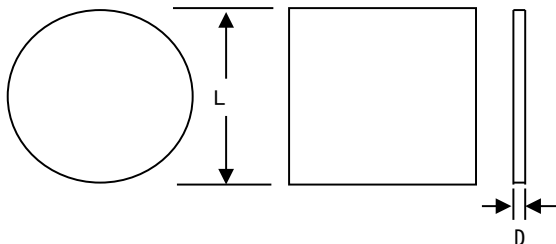

L (直径又は一辺の長さ) : 125.0mm  
D (厚さ) : 0.4、0.6、0.8mm

3. 原材料

ポリプロピレン成形用及び押出用材料

**【使用目的又は効果】**

歯科用装置(コーピング、テンポラリークラウンまたはブリッジ用印象)の作製

**【使用方法等】\*\***

1. 歯科技工用成型器として、Scheu Dental 社製のバイオスター(※1)又はミニスター(※2)を使用する場合。
  - 1) 成型器の使用・操作方法に従って、直径125mmの本品を成型器にセットする。
  - 2) 石膏模型を成型器にセットする。
  - 3) セットした製品固有のCODE(※3)を入力する。又は成型器にバーコード(※3)を読み取らせ、成形条件(加熱時間と冷却時間)を設定する。
  - 4) 本品を加熱した後、加圧成形する。
  - 5) 冷却後、模型から成形品を取り外し、余剰部分をトリミングする。
  - 6) 辺縁等を仕上げ、装置が完成する。

※1 販売名「バイオスターVII」(届出番号:13B2X00107000040)  
製造販売業者:株式会社JM Ortho

※2 販売名「ミニスターS scan II」(届出番号:27B1X00109000325)  
製造販売業者:株式会社モリタ

※3 成形条件を示す3桁のCODEやバーコードは本品表面または外箱に表示されている。

2. 1. で指定した歯科技工用成型器以外を使用する場合

- 1) 使用する成型器に本品の直径もしくは一辺の長さが適合するのを確認し、セットする。
- 2) 石膏模型を成型器にセットする。
- 3) 成型器に使用方法・操作方法に従って加圧成形を行う。
- 4) 以下は1.の5)と6)と同様。

**【使用上の注意】\***

<重要な基本的注意>

- ・本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・万が一、製品に変形等の異常がある場合には使用しないこと。
- ・成形は使用する成型器の取扱説明書に従って行うこと。
- ・本品はアクリル系材料と接着しないため注意すること。
- ・成形の際は過加熱に注意すること。
- ・成形は風通しの良い場所で行うこと。
- ・3Dプリンタで作製した模型に対して使用する場合は、模型を十分に重合乾燥させてから使用すること。また、分離用シートの使用を推奨する。(推奨:イソフオランオイル/Scheu Dental社製)
- ・熱変形防止のため、本品から作成した装置は熱湯消毒しないこと。ぬるま湯ですすぐ又はリナー洗浄剤等を使用すること。
- ・本品を廃棄する場合には、「廃棄物処理に関する法律」に従って適切に処理すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

- ・外圧がかからないように保管すること。
- ・加熱機器(ストーブ等)周辺には保管しないこと。
- ・埃、水分等が付かないようにすること。
- ・直射日光・紫外線を避けて、常温にて乾燥保管すること。

**【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者:株式会社JM Ortho  
住 所:東京都千代田区神田駿河台2-2  
御茶ノ水杏雲ビル14F  
電 話 番 号:03-5281-4711  
F A X 番 号:03-5281-4716  
製 造 業 者:Scheu Dental GmbH(ドイツ)