

歯 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用ユーティリティワックス (70896000)
セットアップワックス

【禁忌・禁止】

本材あるいは類似の成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある場合は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

概要：本品は細長い棒状のワックスである

形状：棒状

原材料：ミネラルワックス

融点：59°C

【使用目的又は効果】

歯科技工物を製作するために補助的に用いる多目的ワックス。

【使用方法等】

使用目的に合わせて、適量を軟化して使用する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・バーナーで加熱して使用する場合、火傷をしないように注意すること。
- ・過度の加熱や、加熱したままでの放置はしないこと。
- ・本材は、目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】*

- ・外圧がかからないように保管すること。
- ・加熱機器（ストーブ等）周辺には保管しないこと。
- ・埃、水分等が付かないようにすること。
- ・直射日光・紫外線を避け、室温にて保管すること。
- ・歯科医療有資格者以外の者が触れないよう適切に保管、管理すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：株式会社 JM Ortho

住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F

電 話 番 号：03-5281-4711

F A X 番 号：03-5281-4716

製 造 業 者：SCHEU-DENTAL GmbH (ドイツ)