


機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル 35170000

S P I ドリルエクステンション

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

本品には、外径の違いにより、次の 2 種類がある。

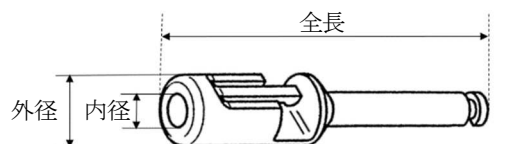

(単位：mm)

種類	内径	外径	全長
3.5-4 用	2.4	3.7	26.0
4.5-6 用		5.0	

【体に接触する部分の主な組成】

ステンレス鋼

【原理】

本品に歯科用ドリルを装着してハンドピースへ接続することで歯科用ドリルを保持し延長する。

【使用目的又は効果】

歯科用ドリルを保持し、全長を延長するために用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) 専用の歯科用ドリルを本品に装着する。
- (2) 本品をハンドピースに接続して使用する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) 装着する歯科用ドリルに指定されている回転数以下で使用する。
- (3) 使用前に、回転させて振れがないことを確認すること。

【保守・点検に係る事項】

【清掃・洗浄】

- (1) 清掃にはナイロンブラシを使用し、ワイヤブラシ等は使用しないこと。
- (2) 塩素含有量が高い洗浄剤・消毒剤、及びシュウ酸入りの洗浄剤・消毒剤は使用しないこと。

【滅菌】

- (1) 使用前に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：
115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：トーマン メディカル AG
Thommen Medical AG

国名：スイス

【お問い合わせ先】

問 合 せ 窓 口：株式会社モリタ お客様相談センター

電 話 番 号：0800-222-8020（無料）

F a x 番 号：0800-222-6480（無料）

E - m a i l：e-customer@morita.com