

器 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用チューブ (31759000)
チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

ニッケルに対しアレルギーのある患者には使用しないこと。
再使用禁止

【製造販売者又は製造業者の氏名又は名称等】**


製造販売者：株式会社 JM Ortho
住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F
電 話 番 号：03-5281-4711
F A X 番 号：03-5281-4716
製 造 業 者：RMO, INC. (アメリカ)

【形状・構造及び原理等】


1. 原材料
ステンレススチール、鉄、クロム、ニッケル、マンガン他

2. 形状
標準形状は下図のとおり。

1) シングル

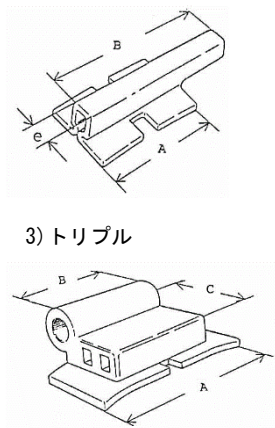

2) ダブル

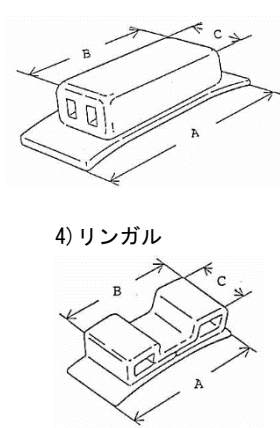

3) トリプル

4) リンガル

【使用目的又は効果】

歯科矯正用

【使用方法等】

歯面に接着し、矯正線の保持に用いる。

<使用方法に関連する使用上の注意>

ダイレクトボンディング品の場合

- ・ 使用になる接着剤の指示に従って、歯面に接着すること。
- ・ ボンディングベースが油分等で汚れていると、適切な接着力が得られません。

【使用上の注意】*

1. 重要な基本的注意

- ・ 万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。
- ・ 本品を廃棄する場合には、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理ください。
- ・ ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
- ・ 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 開封前は特に指定しないが、外圧がかからないように保管すること。
- ・ 一度開封した製品は、埃、水分等が付かないようにすること。