

器 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント (41059000)
ブラケット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

ニッケルに対しアレルギーのある患者には使用しないこと。
再使用禁止


【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社 JM Ortho
住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F
電 話 番 号：03-5281-4711
F A X 番 号：03-5281-4716
製 造 業 者：RMO, INC. (アメリカ)

【形状・構造及び原理等】*

1. 原材料
ステンレス 鉄、クロム、ニッケル、マンガン他

2. 形状及び寸法

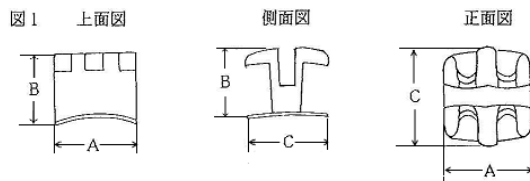

部位	近遠心幅 (A)	高さ (B)	咬合面-歯頸側幅 (C)
寸法(mm)	1.3~6.1	1.3~2.1	3.0~6.1

3. 種類

- ・シナジィー (シナジィーH.S. を含む)
- ・ミニトラス
- ・インテグラ
- ・グレイス

【使用目的又は効果】

歯列矯正用

【使用方法等】*

歯面に接着し、矯正線の保持に用いる。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- ・使用する接着剤の指示に従って歯面に接着すること。
- ・ボンディングベースが油分等で汚れていると適切な接着力が得られないため、使用前に確認すること。

【使用上の注意】*

1. 重要な基本的注意

- ・万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。
- ・本品を廃棄する場合には「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理すること。
- ・ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】*

- ・開封前は特に指定しないが外圧がかからないように保管すること。
- ・一度開封した製品は、埃、水分等が付かないようにすること。