

* 2018年6月11日 第5版

* 2016年5月14日 第4版

類別:管理医療機器機械器具 03 医療用消毒器(診療施設用機械装置)

ホルムアルデヒドガス消毒器(コード:70472000)

「ホルステリ 12RM」の付属品

「ホルステリ 20RM」の付属品

ホルステリデンタル専用中和液/ホルステリデンタル専用消臭液

再使用禁止

【 警告 】

☐薬品の取扱に関して

- 使用前に本説明書および本体付属の取扱説明書を必ずよく読むこと。
- 法的有資格者以外は取り扱わないこと。
- 薬液が着衣に付着した場合は直ちに脱衣すること。
- 目や皮膚につくと炎症の危険があるので注意すること。
- ガスを大量に吸うと呼吸困難や咽頭炎の危険があるので注意すること。
- 薬液の取扱は、保護マスク、保護メガネ、防水性の手袋を着用すること。
- 薬液が目に入った場合や皮膚に触れてしまった場合は、大量の水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けること。
- 吸引した場合は、直ちに新鮮な空気のある場所に移動し必要に応じて酸素吸入を行い医師の診断を受けること。

【 禁忌・禁止 】

- 中和液はアルカリ性で目や皮膚に付着すると炎症を起こす危険性があるため、直接素手で取り扱わないこと。
- ガス化した中和液を多量に吸気すると呼吸困難や咽頭炎を引き起こす危険性があるため、取扱には十分注意すること。
- 中和液・消臭液は「ホルステリ 12RM」「ホルステリ 20RM」以外には使用しないこと。

【 形状・構造及び原理等 】

<形状>

- 中和液:赤色の液体でアルカリ性(主成分:アンモニア)
- 消臭液:緑色の液体で酸性(主成分:リンゴ酸)

<包装形状>

中和液・5本と消臭液・5本セット/箱

【 使用目的又は効果 】

ホルムアルデヒドガス消毒装置より排気されるホルムアルデヒドガスを中和し消臭する。

【 使用方法 】

本体付属の取扱説明書を参照し、正しい場所に正しい分量を入れて下さい。

【 使用上の注意 】

- 中和液・消臭液は、使用期限を過ぎた物は使用しないで下さい。
- 中和液・消臭液の色素は、識別し易くするために着色しており、色落ち等が有りましても効果は変わりません。
- 安全データシートを確認し御使用下さい。

【 保管方法及び有効期間等 】

<保管方法>

高温、多湿、直射日光を避け、室温で暗所に保管すること。

<使用期限>

適切な保存方法で製造より1年間「自己認証データによる」

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

株式会社 アスカメディカル

大阪本社 〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目2丁目12番10号

TEL 06(6939)3011 FAX 06(6939)3225

URL:<http://www.asukamedical.co.jp>

東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋1丁目12番2号

TEL 03(5820)5662 FAX 03(5820)5663

【 販売業者 】

*株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目2番 御茶ノ水杏雲ビル14F

TEL 03(5281)4711

取扱説明書を必ずご参照願います。