



## ジョージゲージのお手入れ方法について

ジョージゲージのお手入れ方法は以下の通りです。

### ● ジョージゲージ本体

口腔内に接触する箇所がありますので、消毒が必要です。消毒の際は、以下の点にご注意ください。

- 1) 熱を加えると変形の恐れがありますので、加熱して滅菌・消毒を行う方式は使用できません。
- 2) ホルムアルデヒドを含有した薬剤等は使用しないでください。
- 3) お手入れ前には、必ずゴミや唾液等を取り除き、水洗してください。
- 4) 低濃度の過酸化水素水、イソプロピルアルコールまたは不活性成分を含有するほとんどの消毒剤による消毒が可能です。
- 5) 4時間以上アルカリ性の2%グルタルアルデヒド溶液に浸すと、より効果的な消毒が期待できます。
- 6) 消毒・滅菌の際は、各洗浄剤/滅菌器メーカーの使用 방법에必ず従ってください。特に希釈の必要性や、薬剤を接触させたままにしておいてよい時間、温度、抗菌作用の範囲、薬剤の再利用できる回数などには特に注意が必要です。

### ● バイトフォーク

ディスポーザブルタイプですので、複数回の使用はできません。各種バイトフォーク単品をご購入ください。