あなたの歯科矯正治療をはやく進めるために

さま

今日、筋機能矯正装置 マルチ-TB という装置をお渡ししました。



この装置はとてもシンプルなものに見えますが、実は下記のような多くの働きをします。

- あなたの口を少し開けた状態にします:
 - ⇒ これにより上顎の歯と下顎の歯が触れ合わないので、歯の移動が早くなります。
- あなたの下顎を少し前に出します:
 - ⇒ これにより口の周りの筋力のバランスを調整し、顔の輪郭を整えます。
- あなたの唇や頬が歯列に触れないようにします:
 - ⇒ これにより理想的な歯列の形成を助けます。

マルチ-TB 装置は特別なシリコーン製で、あなたの歯牙に対して優しく継続的な力を与えることによって、矯正装置による歯列の形成を補助します。

この装置を使用するにあたって大事なことは、口で呼吸をしないで、鼻で呼吸をするように気を付けることです。口呼吸は、歯並びを悪くする最も重大な原因の一つであるばかりではく、治療終了後の後戻りの可能性を高めます。

マルチ-TB 装置を使うことの利点をさらに詳しく説明すると・・・

- 1. あなたの矯正治療が早く、シンプルになります。
- 2. 上下顎の位置関係を改善するために、上下顎をエラスティックゴム(輪ゴム)で留める治療の期間を短く、または無くすことが出来ます。
- 3. 矯正治療終了後の後戻りの可能性が低くなります。
- 4. マルチ-TB 装置を装着している間、ブラケットが唇や頬の内側に当たって痛くなることがありません。
- 5. 寝ている間に鼻で呼吸することを覚え、いびきが軽減します。

マルチ-TB 装置は、いつ装着したらよいのか?

- 週末も含めて、毎日装着するようにして下さい。
- 毎日夕食後、歯磨きの後に装着し、就寝中も含めて次の朝まで装着し続けて下さい。
- 午後、家にいる間(テレビを見ている間や、本を読んでいる間、TV ゲームをしている間 など)も装着すると、なお効果が期待できます。
- 起きている時にマルチ-TB 装置を装着する場合は、鼻で呼吸することを意識して下さい。

装置の使用にあたって

- ・ 装着する前は流水で軽くすすぎ、必ず上の歯から先に合わせて、ゆっくり噛みこむようにして装着して下さい。
- 装置を外した後は、流水ですすぎ、良く乾かしてから専用ボックスに入れて保管して下さい。
- ・ 装置の洗浄には、リテーナー洗浄剤「リテーナーシャイン」の使用をお勧めします。 30分ほどで洗浄が終わりますので、食事中に洗浄をしておくと良いでしょう。
- 専用ボックスも忘れずにこまめに水洗いし、良く乾かして清潔に保って下さい。
- 専用ボックスには専用のステッカー、または他のシール等を蓋に貼り、名前を書いてなくさないように気を付けて下さい。
- 専用ボックスにステッカー等を貼る際は、通気孔をふさがないように注意して下さい。
- ・ ペットを飼っている方は、ペットのおもちゃにならないように注意して下さい。特に 大は飼い主さんの匂いと装置の噛みごこちが大好きです。
- ・ 歯ぎしりが強い患者さんの場合、装置がすぐに破損してしまう場合があります。その 場合は先生に相談して下さい。

これで、マルチ-TB 装置を使うことの意味と その利点を良く理解して頂けたものと思います。

マルチ-TBで、あなたの矯正治療をより早く、快適に進めましょう!