

OSAMU ボンド**【禁忌・禁止】**

- ・本品を用いて作製した装置に対し、アレルギー反応を発生した患者には使用しないこと。
- ・本品に対して発疹、皮膚炎等のアレルギーや過敏症等の既往歴のある患者及び術者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は透明の揮発性の液体である。異なる材質の歯科用咬合スプリント用プレートを合着させるために用いる。

商品番号：3246

2. 形状

透明の液体

3. 原理

本品はエチレン・酢酸ビニル共重合樹脂（EVA樹脂）の表面の分子を緩ませ、他のスプリント材料と合着させる。

4. 原材料

シクロヘキサン
エチルメチルケトン
ペンタン
ヘキサン
ヘプタン
塩素化ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

歯科用咬合スプリントを作成するために用いる。

【使用方法等】

＜本品を用いて接着させる歯科用材料＞

軟質材：販売名「バイオプラスト」
（承認番号：20500BZY00731000）

硬質材：販売名「ニューインプレロンS PD」
（認証番号：228AKBZX00103000）

＜使用方法＞

- 1) 歯科技工用成型器(※)を使用して、バイオプラストを模型上に熱成形する。
- 2) 放置放冷した後、バイオプラストを模型から外し不要な部分をトリミングする。
- 3) 模型にバイオプラストを戻し、アルコール等でクリーニングし、本品を塗布する。
- 4) 通法通り、ニューインプレロンS PDを熱成形する。
- 5) 放置放冷した後、模型から成形した装置を取り外し、辺縁を研磨し仕上げをする。

(※) 推奨する歯科技工用成型器

販売名「バイオスターⅦ」(届出番号：13B2X00107000040)

製造販売業者：株式会社 JM Ortho

製造業者：Scheu Dental GmbH

販売名「ミニスターS scanⅡ」(届出番号 27B1X00109000325)

又は「ミニスターS scan」(届出番号 27B1X00109000274)

製造販売業者：株式会社モリタ

製造業者：Scheu Dental GmbH

【使用上の注意】

＜禁忌・禁止＞

- ・本品を用いて作製した装置に対し、アレルギー反応を発生した患者には使用しないこと。
- ・本品に対して発疹、皮膚炎等のアレルギーや過敏症等の既往歴のある患者及び術者には使用しないこと。

＜重要な基本的注意＞

- ・適切な換気がなされている場所で使用すること。
- ・火気の近くで使用したり、火気の近くに置いたりしないこと。
- ・机上等にこぼした場合は、乾いた布でよく拭き取ること。
- ・本品の使用により、皮膚や呼吸器の炎症、眠気やめまい等の健康被害が生じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師の診断を受けること。
- ・皮膚に付着した場合は、多量の流水と石けんで洗うこと。
- ・万が一、目に入った場合は、多量の流水で洗浄し眼科医の診断を受けること。
- ・本品は、【使用目的又は効果】欄に記載されている目的以外の用途で使用しないこと。
- ・本品を廃棄する場合は、関連法及び地方自治体の定める規則に従って、適切に処理すること。決して排水溝に流さないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

- ・冷暗所に保管すること。
- ・火気厳禁品であるため、火気・熱源の近くで保管しないこと。また、静電気の発生にも注意すること。保管場所付近で喫煙しないこと。
- ・本品は揮発性を有するため、蓋を固く閉めて保管すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 JM Ortho

住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F

電話番号：03-5281-4711

FAX番号：03-5281-4716

製造業者：Scheu Dental GmbH（ドイツ）