

シグネチャー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

本品は再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 原材料
酸化アルミニウム
2. 形状及び寸法



ロスタイプは下表のとおり。

部位	近遠心幅	高さ	咬合面-歯頸側幅
寸法(mm)	2.5~3.5	1.5~2.3	3.3~5.0

【使用目的又は効果】

本品は歯列矯正用に用いる。

【使用方法等】

歯面に接着し、矯正線の保持に用いる。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- ・使用になる接着剤の指示に従って、歯面に接着すること。
- ・ボンディングベースが油分等で汚れていると、適切な接着力が得られません。

【使用上の注意】*

1. 重要な基本的注意
 - ・万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。
 - ・本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・開封前は特に指定しないが、外圧がかからないように保管すること。
- ・一度開封した製品は、埃、水分等が付かないようにすること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社 JM Ortho
住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F
電 話 番 号：03-5281-4711
F A X 番 号：03-5281-4716
製 造 業 者：CDB CORPORATION (アメリカ)