

器 58 整形用機械器具  
管理医療機器 歯列矯正用ワイヤ (16204000)

## ワイヤー

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

ニッケルに対しアレルギーのある患者には使用しないこと。  
本品は再使用しないこと。

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 原材料

- 1) ステンレス JIS G 4303のステンレス鋼棒
- 2) エルジロイ合金 コバルト, クロム, 鉄, ニッケル, 他

##### 2. 形状及び寸法

###### ・断面の形状及び寸法

種類	断面形状	断面寸法	
		mm	インチ
ラウンド	○	0.142~1.549	0.0056~0.061
スクエアー 及びレクタ ンギュラー	□ □	0.406×0.406 ~ 0.546×0.711	0.016×0.016 ~ 0.0215×0.028

###### ・形態(デザイン)別の形状及び寸法

##### (1) ストレートワイヤー

ストレート(直線状の線)

###### 1-1. ストレートワイヤー

オーソドンティックワイヤー  
クラスプワイヤー、リテーナーワイヤー

###### 1-2. ツイストワイヤー

トリフレックス、スプラフレックス  
ワイヤーフォーム(ループ、フック、ポスト付与)

###### 1-3. リンガルアーチ

リンガルアーチ、セクショナルリンガルアーチ  
3Dリンガルセクショナル、3D DYS モジュール  
3Dマルチパーパスアダプター  
バイオプログレッシブオギジラリー

##### (2) アーチワイヤー

###### 2-1. アーチワイヤーブランクス

ストレート、ツイスト

###### 2-2. ペンタモーフィックアーチ

###### 2-3. コンビネーションアーチ、ユーティリティアーチ

###### 2-4. 3D(スリーディメンション)

3Dリンガルアーチ、3Dバイメトリックアーチ  
3Dバイメトリックディスタライジングアーチ  
3Dスペースメインテナー  
3Dマルチアクションマンディブラーアプライアンス  
3Dマルチアクションパラタルアプライアンス  
3Dパラタルアプライアンス  
3Dクワッドヘリックス、3D D.Y.S モジュール

###### 2-5. バイオプログレッシブ

トリートメントアーチ、オギジラリー  
ユーティリティアーチ

###### 2-6. トルキングアーチ

ライトワイヤートルキングアーチ  
マキシラリーアンテリアトルキングアーチ  
ライトワイヤーカスピッドループアーチ

###### 2-7. オープンループオギジラリー

###### 2-8. クワッドヘリックス

リムーバブル、フィクスド

###### 2-9. リテーナーフォーム

アーチカントアー、ノンアーチカントアー

###### 2-10. クラスプ

###### 2-11. 補助用装置

##### (3) スプリングワイヤー(コイル又はバネ状に加工された線)

###### 3-1. コイルスプリング(コイル状)

オープンコイルスプリング  
クローズドコイルスプリング  
ストップワウンドコイルスプリング

###### 3-2. スプリング(バネ状)

アンテリアトルキングスプリング  
バラレリングスプリング  
リトラクティングスプリング  
オギジラリースプリング  
アップライティングスプリング  
カスピッドリトラクティングスプリング  
バイオプログレッシブオギジラリー

##### (4) リガチャーワイヤー

###### 4-1. プリフォームドリガチャーワイヤー

###### 4-2. リガチャーワイヤー

#### 【使用目的又は効果】

歯科矯正用

#### 【使用方法等】

歯列矯正用アタッチメントと併用し、歯牙の位置を移動するために歯牙に圧力を加える。エルジロイ合金は熱未処理合金であるので、形態付与後 510°C で熱処理を行うものとする。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- ・ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
- ・本品の使用により発疹などの過敏症があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・万が一、変形や変質をしている製品がある場合には、使用せずに弊社まで御連絡ください。
- ・エルジロイ合金は熱未処理合金です。熱処理する場合は、形態付与後 510°C で実施して下さい。
- ・3D ポスト付製品(2-4 枠内 4 品)は、以下に注意すること。
- ・脱着時に本品の熔接部に無理な力をかけないようにすること。
- ・模型上でトルクを与える時、熔接部に無理な力をかけないこと。(無理な力をかけると外れることがある。)

#### 【保管方法及び有効期間等】

- ・一度開封した製品は埃、水分等が付かないようにすること。

#### 【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】\*\*

製造販売業者: 株式会社 JM Ortho

住 所: 東京都千代田区神田駿河台 2-2

御茶ノ水杏雲ビル 14F

電 話 番 号: 03-5281-4711

F A X 番 号: 03-5281-4716

製 造 業 者: Ultimate Wireforms, Inc. (USA)

DENTSPLY Raintree Essix (USA)

RMO, INC. (USA)

Cablestrand Corp (USA)