

持針器

【禁忌・禁止】

〔適用対象（患者）〕

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

**【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品は、ハンドルをもつ手術器具で、遠位端から転心までの刃の先端は様々な形状になっており、縫合時に縫合針を保持するように設計されている。ハンドルには、縫合針を保持した状態を維持（固定）するためのラッチがついている。

**【種類】 品番一覧

マッシュアップライヤー スリムチップ	678-330
マッシュアップライヤー パーマシャープ	678-332
マッシュアップライヤー ワイドチップ	678-331
オルセンヘガー	NH5068 NH5072 NHOH
カストロビージョ	NHCV NH5021 NH5020 NH5020R NH5024 NH5024R NH5024RC NHCV18
カストロビージョ コーテリニ	NH5024CORT
カストロビージョ サイモン	NH5024SIM
ギリズ ファイン	NHGILFINE
クライルウッド	NHCW NH5038
スウェーデン パターン	NH5052
ダーフ	NH5032 NHD
ポイントン	NHB
ホルセイ	NH5036 NH5037
マイクロカストロビージョ	NH5021M NHM-5027 NHDCPVN NH5020M NHM-5025R NHM-5026R NHM-5028 NHDPV NHDPVN NHTMBH NHDCPV
マイクロカストロビージョ スイスペリオ	SPNHDPVN
マイクロ バスキュラー	NH5084 NH5082
マッシュ	NHM NH5076
マッシュコーチャー	NH5074 NH5074E
メイヨー・ヘガー	NHMH NH5042 NH5044
HMT シンジョー	NH5050
アルーガ	NH5022
ウェブスター	NHW NH5030
コリアー	NHC
ドバイキ	NH5046
ヘガーバウムガートナー	NHNB NH5034
ミニライダー	NH5092 NH5094
リヒテンベルク	NHLBPSE

【使用目的又は効果】

縫合時に縫合針を保持するのに用いる。

【使用方法等】

作業部で縫合針を保持し、ラッチを固定した状態で使用します。

【使用上の注意】

〔使用方法〕

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (2) 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- (3) 故障の原因となる無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- (4) 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- (5) 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- (6) 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の改造は行わないこと。
- (7) 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ホビドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸カルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- ・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。〔使用上の注意参照〕
- ・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- ・点検後、セット・包装をし、滅菌をすること。
- ・177℃以上に加熱しないでください。
- ・フェノールは使用しないこと。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- ・滅菌後、水分は拭き取り乾燥させること。
- ・樹脂部を有する器具は樹脂部を取りはずしてから滅菌すること。
- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

【包装】

単品包装： 1本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

ヒューフレディ・ジャパン合同会社

電話番号： 03-4550-0660

<外国製造業者>

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC (米国)