

**2019年5月作成(第6版)
*2018年7月作成(第5版)

医療機器認証番号 20800BZZ00815000

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント 41059000

ワイヤークリップ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・ ニッケルに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
- ・ 再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

基本形状は、円形と四角形があり、患者の症状によりフックをつけて製造する。

・形状

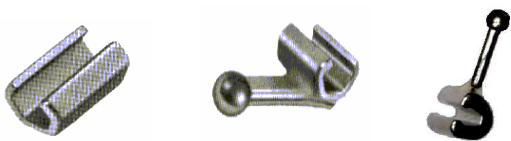

・スロットサイズ

0.018 × 0.025 または 0.022 × 0.028

・原材料 ステンレス鋼 SUS304

Cr 18.0 ~ 20.0% Ni 8.0 ~ 10.5%

その他(C, Si, Mn, P, S) 5%以下 Fe 残分

・原理

歯列矯正用ワイヤを挟み、接続、固定、フックとして機能し、歯列矯正力の付加を助長する。

【使用上の注意】

・使用注意

本品は【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。

本品を廃棄する場合には、廃棄物処理に関する法令等に従い、適切に処理してください。

・重要な基本的注意

本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

使用する接着剤、接着方法の不具合などにより、装着中に本品が脱落する場合があります。

その場合は直ちに医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

・保管方法

開封前は特に指定しないが外圧がかからないよう保管する。

一度開封した製品は埃、水分等が付かないようにする。

・耐用期間

使用開始から5年間

[自己認証(当社データ)による]

【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いる。

【使用方法等】

歯列矯正用ワイヤ等を患者に適合するように屈曲や切断をする。

そのワイヤの目的とする位置に挟み、溶接などで固定する。

それを、患者に装着された歯列矯正用アタッチメント等に装着する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社カンノ

住所 : 千葉県流山市おおたかの森西3-3-8

連絡先 : 04-7150-8822

製造業者 : 株式会社カンノ