

機械器具 66 歯科用練成器  
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000

## ミキシングチップ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】


##### <使用方法>

再使用禁止。

#### 【形状・構造及び原理等】\*\*

##### 【形状・構造】

本品は、ミキシングエレメント部（攪拌部）と固定用キャップからなる。

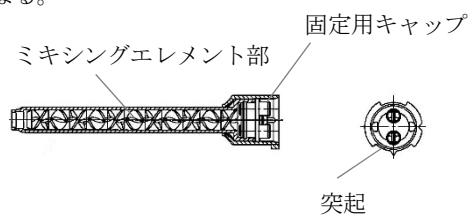

##### 【種類】

| 種 類         | 色調（キャップ） |
|-------------|----------|
| ミキシングチップ L  | グリーン     |
| ミキシングチップ S  | ピンク      |
| ミキシングチップ XS | イエロー     |

##### 【体に接触する部分の主な組成】

ミキシングエレメント部：ポリオキシメチレン共重合体  
固定用キャップ：ポリプロピレン

##### 【原理】

2 種類のペースト状歯科材料が、本品のミキシングエレメント部を通過することで練和が行われ、本品先端部より練和物が押し出される。

#### 【使用目的又は効果】

カートリッジに充填されたペースト状歯科材料の練和及び注入に用いる。

#### 【使用方法等】\*\*

##### 【使用方法】

- (1) ペースト状歯科材料が充填されたカートリッジをディスペンサーに装着し、カートリッジ先端のキャップを取り外す。
- (2) 本品の固定用キャップにある突起とカートリッジ 先端上部のV字型の溝とを合わせ、時計方向に90°回転させ、本品を取り付けて固定する。
- (3) ディスペンサーの添付文書等に従って操作し、歯科材料の練和物を本品先端部より押し出す。

##### 【組み合わせて使用する医療機器】

- (1) 本品は、「販売名：カートリッジディスペンシングガンⅡ（届出番号：27B1X00109000202）」と併用して使用できる。

##### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) 本品内の歯科材料が硬化している場合は、無理にディスペンサーを操作せず、新しい本品に取り替えること。

- (2) 使用後（歯科材料を排出後）、本品は取り外さず、次回使用時まで装着しておくこと。[容器内で印象材が硬化するおそれがある]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：ジェイ・モリタ・ユーエスエー  
J. Morita USA, Inc.

国名：アメリカ合衆国

##### 【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com