

再使用禁止

歯列矯正用ステンレスクラスプ**【禁忌・禁止】**

- ・ニッケルに対してアレルギーのある患者には使用しないこと。
- ・本品を使用してアレルギー反応を発生した患者には使用しないこと。
- ・再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、歯科の矯正材料として用いるステンレス鋼製のクラスプである。可撤式の矯正装置を口腔内に保持するために用いる。


2. 形状と寸法

ボールクラスプ、Jクラスプ、アダムスクラスプの3種類の形状がある。

1) ボールクラスプ

下図のように、軸となるワイヤーの先端にボール状の構造物を持つクラスプである。

この先端形状を歯間空隙に適合させて用いる。

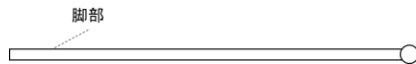


2) Jクラスプ


軸となるワイヤーの先端になだらかなアーチ状の構造物を持つクラスプである。このアーチの形状を歯のアンダーカットに掛かるように適合させて用いる。

ストレートタイプと傾斜タイプの2種類がある。

2)-1 ストレートタイプ

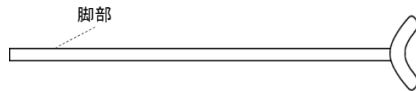

2)-2 傾斜タイプ

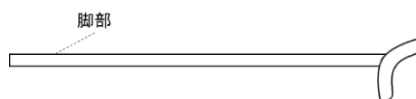

3) アダムスクラスプ

2つの突き出した形状を臼歯の頬側近遠心のアンダーカットに適合させて用いる。



3. 原材料

ステンレス鋼

4. 原理

口腔内で可撤式矯正装置を装着する際、本品の形状が鉤となって保定する。

【使用目的又は効果】

可撤式の矯正装置を歯等に維持するために用いる。

【使用方法等】

1. 作業用模型の歯間空隙や、歯面に適合するように本品の形状を調節し、脚部を口蓋方向へ屈曲する。
2. 必要に応じて脚部を適切な長さに切断し、先端をレジン床の固定部（アンカー）になるようにループ状もしくは鉤状に曲げる。
3. 通法により、アクリル系レジンを充填し、脚部を固定する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品の使用により患者がアレルギー症状を発生した場合は、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。
- ・本品に異常が有る場合は、使用せずに製造販売業者へ連絡すること。

【保管方法及び有効期間等】

本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 JM Ortho

住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F

電 話 番 号：03-5281-4711

F A X 番 号：03-5281-4716

製 造 業 者：Scheu Dental GmbH(ドイツ)