

## BCT オープニングツール

## 【禁忌・禁止】

- ・器具の形態変更や改造等はないこと。
- ・器具を落下させないこと。また、強い衝撃を与えないこと。

## 【形状・構造及び原理等】


## 1. 概要

本品は結さつ材を使用せずにワイヤをスロットに固定する構造（セルフライゲーションシステム）をもつブラケットのうち、S-Line（※1）のドア構造を開けるために用いるペン型の器具である。

※1 販売名「BCT セラミックブラケット」  
認証番号：301AKBZX00035000  
製造販売業者：株式会社 JM Ortho

## 2. 形状、構造

各部位の名称は以下のとおり。

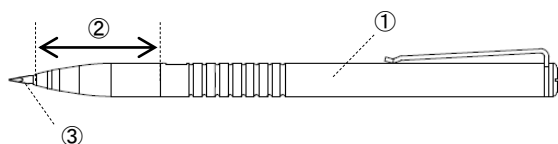

<③拡大図（本体への挿入部を含む）>



図番	名称	機能又は動作
①	本体	ブラケットのドアを開閉する際に把持する。
②	カバー部	チップを交換する際に回転させて取り外す。
③	チップ	ブラケットのドア構造の隙間に差し込み、回転させてドアを開く。交換可能。

## 3. 原材料

本体・カバー部：ステンレススティール  
チップ：ジルコニア


## 【使用目的又は効果】

結さつ材を使用せずにワイヤをスロットに固定する構造（セルフライゲーションシステム）をもつブラケットのうち、S-Line のドア構造を開けるために用いる。

## 【使用方法等】

## &lt;使用方法&gt;

- 1) 先端を S-Line のドア構造の隙間に差し込み、回転させてドアを開く。
- 2) ドアを閉じる時は本品、もしくは指で押して閉じる。

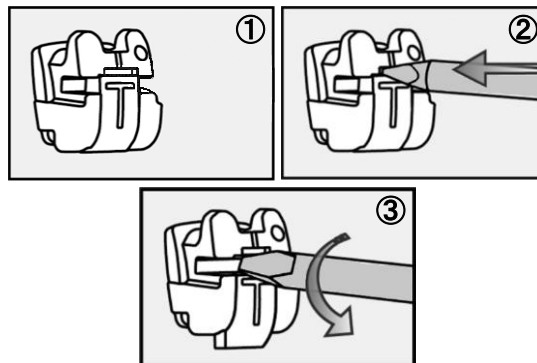

## &lt;チップの交換方法&gt;

- 1) 本体のカバー部を回転させて取り外す。
- 2) チップを交換する。
- 3) カバー部を回転させて元に戻す。

## &lt;洗浄方法&gt;

- 1) 洗浄前に水分、付着物等を使い捨てのペーパータオルで拭き取る。
- 2) 製品を分解し、中性洗剤もしくは溶液を用いて、傷が付かないよう柔らかいブラシで本品の表面および接合部を磨く。
- 3) 清潔な流水ですすぎ、精製水で超音波洗浄する。
- 4) 洗浄後は腐食防止のため直ちに乾燥させる。

## &lt;滅菌・消毒方法&gt;

以下の方法を推奨する。

- ・オートクレーブ滅菌（135℃）
- ・ホルムアルデヒドガス消毒

## 【使用上の注意】

## &lt;重要な基本的注意&gt;

- ・使用前に必ず洗浄、滅菌すること。
- ・製品に変形等の異常がある場合には使用しないこと。
- ・使用の際はブラケットのドア構造の隙間と、本品の先端の向きを合わせること。
- ・患者の口腔内を傷つける可能性があるため過度な力を加えないこと。
- ・洗浄、滅菌および消毒にあたっては使用する機器や薬液の取扱説明書の指示に従うこと。

## 【保守・点検に係る事項】

- ・使用後は洗浄および滅菌し、室温で衛生的に保管すること。
- ・湿度の高い場所に保管しないこと。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 JM Ortho  
住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2  
御茶ノ水杏雲ビル 14F  
電話番号：03-5281-4711  
FAX 番号：03-5281-4716  
製造業者：BIOCETEC CO., Ltd.（韓国）