

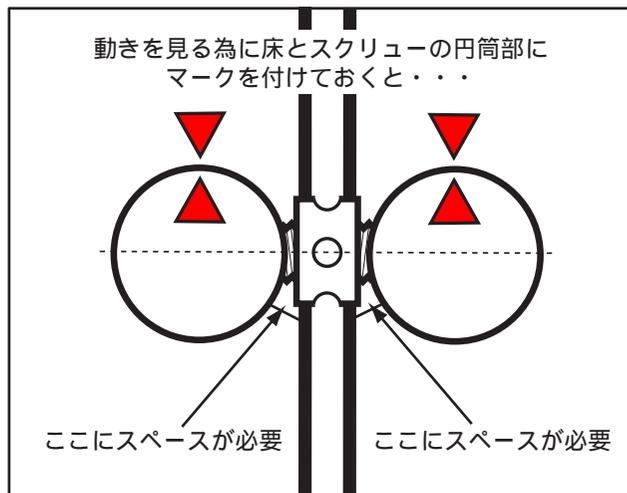
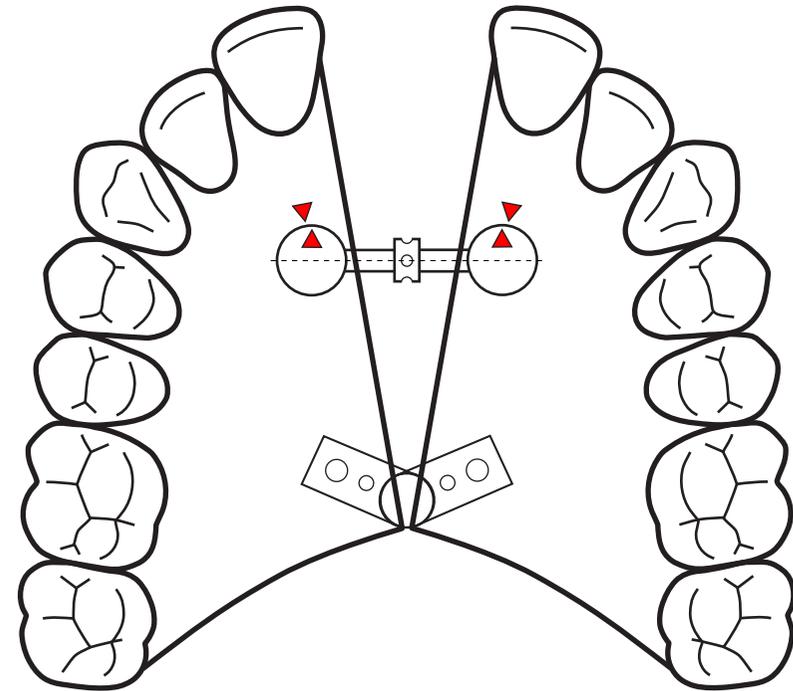


ファンタイプ エキспанションスクリュー (1019Fa) を使用した技工の要点

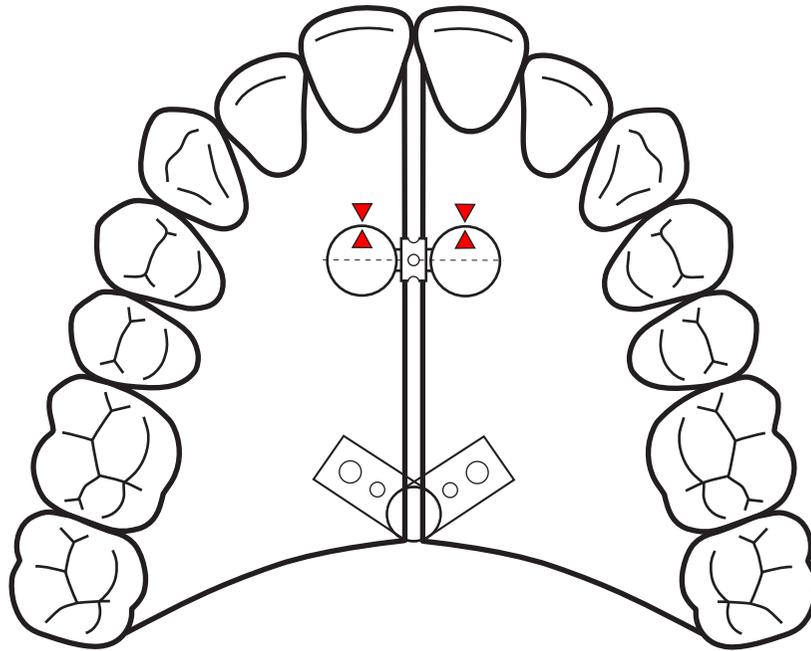

拡大前のスクリュー部の拡大図

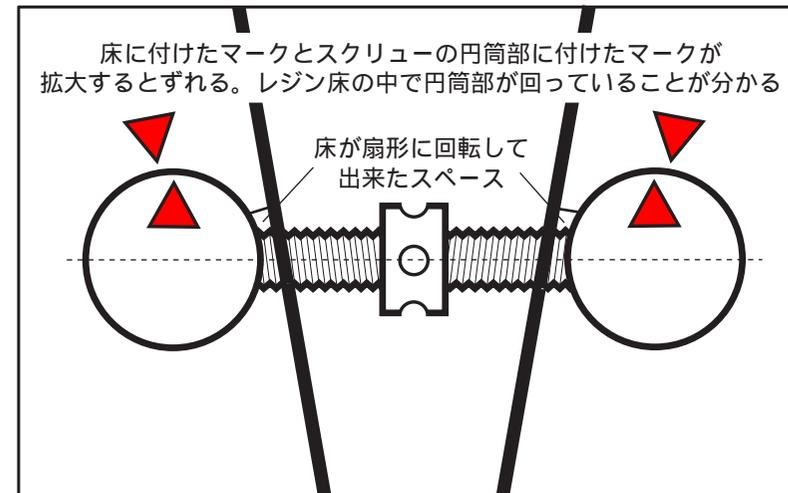

拡大後のスクリュー部の拡大図

ここでは、分かりやすくする為に、少し大きめに拡大していますが、ファンタイプのエキспанションスクリューを使用する上で上の図のような点に注意しなければなりません。スクリューの円筒部やネジ部の露出しているところ、またレジンを侵入させたくない所には、ワセリン等分離効果のあるものを極薄に塗布しておくが良いでしょう。