

タイポント咬合器 説明書 ①

■タイポント咬合器と付属のマイナスドライバー



■ワックスフォーム、メタルティース (別途ご購入下さい。)



上顎ワックスフォームの取り付け

①



②



③



④



①矢印のネジを手で回して外すと、②の状態となります。③は、取り外した部品となります。更に、③の写真中央のネジを付属のマイナスドライバーで取り外すと、④の状態となります。この状態で、ワックスフォームをセットします。ワックスフォームのセット完了後、④、③、②、①と戻ります。

下顎ワックスフォームの取り付け

⑤



⑥



⑦



⑧



咬合器を裏返しにしたものが⑤の状態です。矢印のネジを手で回して外します。外すと、⑥と⑦に分かれます。上顎と同様に、付属のマイナスドライバーで⑦の写真中央のネジを取り外すと、⑧の状態となります。ワックスフォームをセット後、⑧、⑦、⑥、⑤と戻して下さい。

注意

上顎③、④のパーツと、下顎⑦、⑧のパーツは一見良く似た形状をしておりますが、異なった形状です。上顎と下顎を間違えないように注意して下さい。

タイポント咬合器 説明書 ②


弊社のタイポント咬合器は、より細かなセッティングが可能です。
上顎の前後調整、咬合の高さ調整、顎外ゴムを使っての実習などにご使用いただけます。
但し、細かなセッティングにつきましては講師の指示に従って下さい。

●上顎の前後調整



赤い矢印のネジを緩めると上顎を前後に調整できます。

●咬合の高さを調整

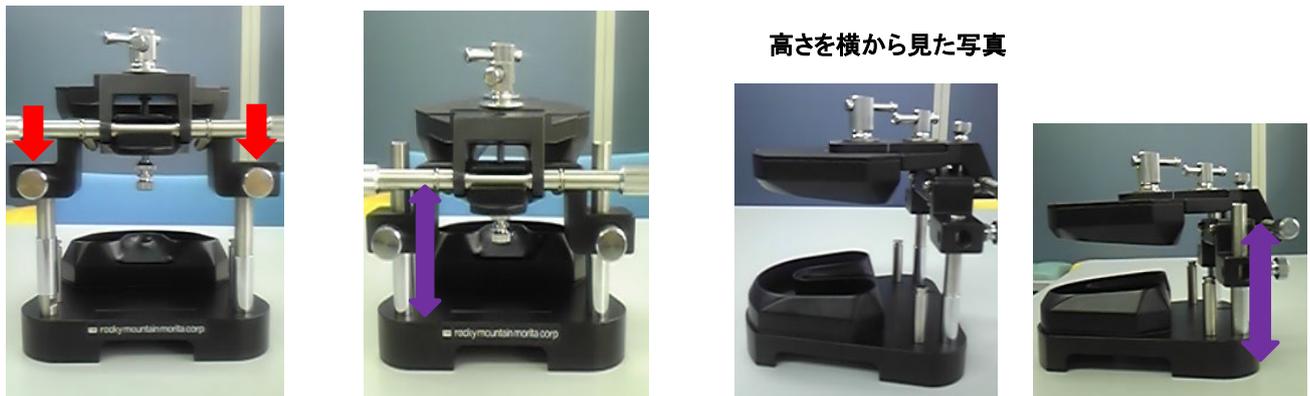

赤い矢印のネジを緩めると高さを調整できます。

●上顎を開く場合



赤い矢印のネジを外すと、自由に開閉できます。

株式会社 JM Ortho