

器 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント (41059000)

再使用禁止

エキスパンションスクリューⅢ

【禁忌・禁止】


- ・ニッケルに対しアレルギーのある患者には使用しないこと。
- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<原材料> ステンレス鋼：鉄、クロム、ニッケル
ニッケルシルバー：銅、亜鉛、ニッケル

<形状>

標準形状は図のとおり。

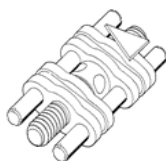

【使用目的又は効果】

歯列矯正用

【使用方法等】**

本品はレジン床に埋め込んだり、アームを有する種類は、アームをバンドにろう着させた後、口腔内に装着する。スクリューのネジ孔に付属のキーを差し込んで適宜回転させることによって床などを拡大させる。

商品番号毎の移動量(拡大・閉鎖)は下表のとおりである。

商品番号	移動量 (mm)		商品番号	移動量 (mm)	
	最大	1回転		最大	1回転
1005/12	5.0	0.8	1020ZG	6.0	0.4
1005/14	6.0	0.8	1021ZS	6.0	0.4
1005/7	4.0	0.8	1040ZG	3.0	0.4
1005T-12	5.0	0.8	1041ZS	3.0	0.4
1006A-10	5.0	0.8	1214/13	5.0	0.8
1006A-12	6.0	0.8	1214/15	11.0	0.8
1006A-14	7.5	0.8	1844	8.0	0.8
1006B-10	5.0	0.8	1845	8.0	0.8
1006B-12	6.0	0.8	2005/7	4.0	0.7
1006B-14	7.5	0.8	2009G	4.0	0.35
1006C-10	5.0	0.8	2040ZG	3.0	0.35
1006C-14	7.5	0.8	2486	3.0	0.7
1006C-15	8.0	0.8	2489	3.0	0.7
1006D-10	5.0	0.8	2490	7.5	0.8
1006D-12	6.0	0.8	2491	4.0	0.7
1006D-14	7.5	0.8	2492	5.0	0.7
1006T-12	6.0	0.8	2494	5.0	0.8
1009G	5.0	0.4	2496	6.0	0.8
1009KG	3.0	0.4	2497	5.0	0.8
1009KS	3.0	0.4	2498	7.5	0.8
1009KSO	3.0	0.4	2509	4.0	0.35
1009LG	9.5	0.4	2510	3.0	0.35
1009LS	9.5	0.4	2512	5.0	0.35
1009LSO	9.5	0.4	2514	5.0	0.35
1009S	5.0	0.4	2516	5.0	0.4
1009SO	5.0	0.4	2520 ☆	3.0	0.35

商品番号	移動量 (mm)		商品番号	移動量 (mm)	
	最大	1回転		最大	1回転
2522 ☆	5.0	0.35	3020ZG	6.0	0.35
2524 ★	9.0	0.9	3021ZS	6.0	0.35
2526 ★	11.0	0.9	3040ZG	3.0	0.35
3005/7	4.0	0.7	3041ZS	3.0	0.35
3005/12	5.0	0.7	4005/11	6.5	0.7
3005/14	6.0	0.7	4005/13	8.5	0.7
3009G	5.0	0.35	4009G	5.0	0.35
3009KG	3.0	0.35	4009S	5.0	0.35
3009KS	3.0	0.35	4009SO	5.0	0.35
3009KSO	3.0	0.35	4040ZG	3.0	0.4
3009S	5.0	0.35	5005/11	7.0	0.8
3009SO	5.0	0.35	5005/13	9.0	0.8
			5005/15	11.0	0.8

☆印…閉鎖タイプ
★印…リテンションアーム付

【使用上の注意】*

<重要な基本的注意>

- ・ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・本品を拡大・閉鎖する際は、専用キーを用いること。
- ・本品は戻り防止のため、矢印と逆方向に回さないこと。
- ・リテンションアーム付(★印)製品のアームをベンドする際、本体アーム挿入部の破損を避ける為、本体をプライヤー等でしっかり固定すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・開封前は特に指定しないが、外圧がかからないように保管すること。
- ・一度開封した製品は埃、水分等が付かないようにすること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 JM Ortho
住所 : 東京都千代田区神田駿河台二丁目2番地
御茶ノ水杏雲ビル 14F
電話番号 : 03-5281-4711
FAX 番号 : 03-5281-4716
製造業者 : Lewa-Dental Feinmechanik GmbH & Co. KG
(ドイツ)
Scheu Dental GmbH (ドイツ)