

反対咬合用オーラルシールド

ムーシールド®

3歳児健診時の反対咬合・第一大臼歯萌出期以降の反対咬合に対応できる機能的顎矯正装置

選べる2サイズ



Mサイズ(第一大臼歯萌出期以降用)

Sサイズ(乳歯列期用)

オリジナルキャラクターがかわいい
患者さん向けリーフレット！

- 被蓋の改善
- 舌圧と口唇圧のバランス
- 舌を高位に保つ機能

<ムーシールド, MUH Shield>は、ムーカンパニーの登録商標です。


ムーシールドのQ&Aは開発者柳澤宗光先生のページでご覧下さい。
<http://ムーシールド.com/>
 3歳児からの受け口治療のページでは治療法の解説が載っています。
<https://muhshield.info>



(A4巻き三つ折)



(A4判)

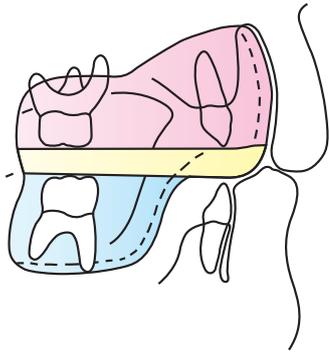

イラスト提供：柳澤宗光先生

材質

ポリメタクリル酸メチル (PMMA)

効能

不正咬合治療を目的とした歯列矯正装置。
本品を装着することによって顎が正常に成長するように促すものである。

適応

Sサイズは乳歯列期(3歳~5歳位)の反対咬合に使用する。(早期初期治療)
Mサイズは第一大臼歯萌出期以降(6歳~11歳位)の反対咬合に使用する。(第1期治療)
第二大臼歯萌出期以降は技工操作により、既製品の床縁をレジンで延長するか大きなサイズを製作することをお勧めします。

使用方法

〈試適〉

顎歯列、舌小帯などの適合をチェックする。
不適合部の調整(削除、研磨)を行う。

〈装着〉

装着は主に就寝中とする。
歯科医師の指示に従い、およそ1年間を目処に使用する。

本品を装着していない時はリテーナーケースに入れて保管してください。
リテーナー洗浄剤での洗浄をお勧めします。

作用機序

上口唇圧を排除し、口唇圧のバランスを整える。
低位舌を改善し、高位で機能させ、逆被蓋の改善を促す。

Medium

第1期治療

6歳5ヵ月

7歳2ヵ月



Small

早期初期治療

3歳6ヵ月

4歳6ヵ月



臨床写真提供：柳澤宗光先生

Mサイズ

Sサイズ

| | | |
|------|----------|------|
| 34mm | 高さ | 30mm |
| 11mm | 舌レスト部の深さ | 9mm |
| 23mm | シールド部の高さ | 21mm |
| 65mm | 幅 | 62mm |
| 42mm | 奥行き | 39mm |



| | 包装 | 商品番号 | |
|------------------------------|----|-----------|-----------|
| ムーシールドS | 2 | MSS | 206850100 |
| ムーシールドM | 2 | MSM | 206850105 |
| 医療機器認証番号 21600BZY00593000 管理 | | | |
| 受け口ってなーに? (患者さん向けプリント) | 50 | MSL2 | 206850108 |
| 月刊柳澤宗光 | 1 | ZTASYA828 | 208990960 |
| ムーシールドボックス青 シール付 | 2 | MSB2BL | 206850107 |
| ムーシールドボックス赤 シール付 | 2 | MSB2RD | 206850106 |

【製造販売元】株式会社バイオデント
東京都荒川区西日暮里2-33-19

【製造】アメリカン・オーソドンティック社

【販売】株式会社 JM Ortho

東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F
T. 03-5281-4711
<https://www.jmortho.co.jp>

● チラシの内容は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
● 消費税は含まれておりません。

● カタログの写真や色は印刷により若干異なります。

● 仕様・価格は2019年4月20日のものです。