

# ホルステリ20RM ドアパッキン交換方法

(商品番号 : ASK330 ホルステリ20RM用パッキン)

ホルステリのドアパッキンは、フレームの枠に嵌め込まれています。  
下記の写真の様に、ドアパッキンを手前に引っ張ると外れます。  
ドアパッキンが外れましたら、新品のドアパッキンを嵌め込んで  
ください。

その後、ドアがきちんと閉じるか確認してください。



※旧タイプはゴムパッキンがシリコーン粘着剤で固定されています。

引っ張っても外れない場合は、株式会社アスカメディカル(TEL:06-6939-3011)  
までご連絡ください。

**株式会社 JM Ortho**

〒101-0063 東京都千代田区神田駿河台2-2

御茶ノ水杏雲ビル14F

TEL : 03-5281-4711 FAX : 03-5281-4716