

## リンガルボタン

### 再使用禁止


#### 【禁忌・禁止】

- ・ ニッケルに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
- ・ 再使用禁止

#### \*\*【形状・構造及び原理等】

\* ベース部は、歯列矯正用帯環に接着する。又は、歯牙に接着する形状・構造になっている。上部は、歯列矯正用エラスチック器材などを引っ掛ける形状・構造になっている。

##### ・形状

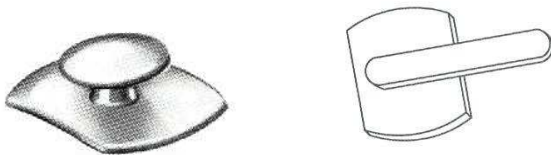

##### ・原材料

ステン鋼 (炭素 ケイ素 マンガン リン 硫黄 ニッケル 銅 鉄)  
銀口 (銀 銅 亜鉛 スズ)

##### ・原理

歯牙に装着し矯正力の付加を助長するものである。

#### 【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いる。

#### 【使用方法等】

患者に適合するサイズの歯列矯正用帯環を選択する。  
本品を、その歯列矯正用帯環の目的とする位置に、溶接などで固定する。  
歯列矯正用帯環の操作方法に従い、患者に装着する。  
直接、歯牙に接着する場合は、患者に適合するものを選択し、歯科用接着剤の使用法に従い、患者の歯面に接着固定する。

#### [使用方法に関連する使用上の注意]

ダイレクトボンディング品の場合

- 1) 使用になる接着剤の指示に従って、歯に接着して下さい。
- 2) 接着面が油分等で汚れていると、適切な接着力が得られません。

#### 【使用上の注意】

##### ・使用注意

本品は【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。

本品を廃棄する場合には、廃棄物処理に関する法令等に従い、適切に処理してください。

##### ・重要な基本的注意

本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

使用する接着剤、接着方法の不具合などにより、装着中に本品が脱落する場合があります。

その場合は直ちに医師の診断を受けさせること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### ・保管方法

開封前は特に指定しないが外圧がかからないよう保管する。

一度開封した製品は埃、水分等が付かないようにする。

##### ・耐用期間

使用開始から5年間

[自己認証(当社データ)による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社カンノ

住所 : 千葉県流山市おおたかの森西3-3-8

連絡先 : 04-7150-8822

製造業者 : 株式会社カンノ