


⚠️ お送りいただく際のご注意 ⚠️

① 電源ケーブル、エアーホース：不要

→ 本体から抜いてお手元に保管しておいて下さい。 ※お手元のケーブルを代品にお使いいただく場合があります

■エアーホースの抜き方■

- ① バイオスターへのエアーの供給をストップします。
- ② ホースの接ぎ手を下に押し込みながら、ホースを引き抜いてください。

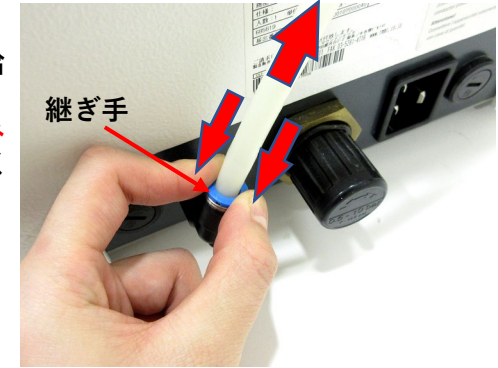

② ステンレスペレット、引き出し：不要

→ 引き出しにステンレスペレット(鉄の粒)を入れてお手元に保管しておいて下さい。



③ モデルカップ、モデルプラットフォーム：必要

→ 修理に際して必要です。
必ず本体にセットして送って下さい。



④ 右図の状態でお送りください

-
- ・ プレート(どれでも可)をチャンバーに1枚セット
 - ・ ヒーターの下に緩衝材をセット
 - ・ チャンバーを閉じてロックした状態



★以上の点を守らずに搬送中に破損した場合は責任を負いかねますので、ご注意ください。お願い致します。