

器58 整形用機械器具  
一般医療機器 歯科矯正用バンドプッシャー (31801000)  
**バンドプッシャー**

**【禁忌・禁止】**

- ・ 歯科矯正用。矯正操作以外に使用しないこと。
- ・ 変形や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること
- ・ 器具を落下させないこと。又は強い衝撃を与えないこと。

**【形状・構造及び原理等】**

原材料：ステンレス鋼

**【使用目的又は効果】**

金属帯環を歯の位置に合わせ、適合させるために用いる。

**【使用方法等】**

歯列矯正用帯環（バンド）を歯牙に装着する際、本品端の金属面をバンドに押し付け、バンドを歯牙に適合させる。

**【使用上の注意】\***

1. 重要な基本的注意
  - ・ 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
  - ・ 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
2. 取扱上の注意
  - ・ 使用前に必ず点検し、洗浄し、滅菌すること。
  - ・ 190℃以上に加熱しないこと。
  - ・ 滅菌にフェノールは使用しないこと。
  - ・ 必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
  - ・ 滅菌後、水分は拭き取り乾燥させること。
  - ・ 樹脂部分は乾熱/オートクレーブ滅菌しないこと。滅菌が必要な場合は事前に分解後、ガス滅菌等の非加熱滅菌を行うこと。
  - ・ 消毒・滅菌には精製水を使用すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

- ・ 埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管すること。
- ・ 薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しないこと。

**【保守・点検に係る事項】**

本品の金属部分はオートクレーブ滅菌が可能  
(推奨滅菌条件：10分/132℃又は20分/121℃)。

**【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】\*\***

製造販売業者：株式会社 JM Ortho  
住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2  
御茶ノ水杏雲ビル 14F  
電 話 番 号：03-5281-4711  
F A X 番 号：03-5281-4716  
製 造 業 者：A. Schweickhardt GmbH & Co. KG (ドイツ)