

器 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科矯正用結さつ器 (37413000)

リガチャープライヤー

【禁忌・禁止】

- ・変形や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること
- ・器具を落下させないこと。又は強い衝撃を与えないこと。

【形状・構造及び原理等】

原材料：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

アーチワイヤ又はブラケットウィングの下に結さつ糸を入れ込んで誘導するか、アーチワイヤ又は補助具を所定の位置に押し込むために用いる。

【使用方法等】

本品は大別してプライヤー状と棒状の形状を有する。前者は歯列矯正用エラスチック器材の弾性バンド等を先端に挟み、主に歯列矯正用ワイヤと歯列矯正用アタッチメントを結さつする。また後者は先端形状を利用して金属製歯列矯正用結さつ材(線)を挟み結さつしたり、アーチワイヤ又は補助具を所定の位置に押し込む。また、本品は再滅菌により繰り返し使用できる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- ・本品を再使用する場合は再滅菌を行うこと。
- ・使用前に必ず点検し、洗浄し、滅菌すること。
- ・190℃以上に加熱しないこと。
- ・滅菌にフェノールは使用しないこと。
- ・ヒンジのある器具は、開いた位置にして洗浄、滅菌を行う必要があり、滅菌の前に、必ず潤滑油を塗ること。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- ・滅菌後、水分は拭き取り乾燥させること。
- ・樹脂部を有する器具は乾熱滅菌しないこと。
- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管すること。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

オートクレーブ滅菌が可能です。

滅菌条件：20分/121℃又は10分/132℃。

【製造販売業者又は製造業者の氏又は名称等】**

製造販売業者：株式会社 JM Ortho

住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F

電 話 番 号：03-5281-4711

F A X 番 号：03-5281-4716

製 造 業 者：A. Schweickhardt GmbH & Co. KG (ドイツ)