

## 歯科矯正用バンド

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本品の原材料に対して過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

### 【製造販売者又は製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売者：株式会社 JM Ortho  
住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2  
御茶ノ水杏雲ビル 14F  
電 話 番 号：03-5281-4711  
F A X 番 号：03-5281-4716  
製 造 業 者：RMO, INC. (アメリカ合衆国)

### 【形状・構造及び原理等】\*\*

#### 1. 概要

本品は、ステンレス製の金属環である。歯列矯正用アタッチメントを歯牙に固定するために用い、歯牙の部位及びサイズ毎に多種類がある。また、本品包装には、単品及びキット品がある。

#### 2. 形状

標準形状は下図のとおり。



本品には以下の種類がある。

	大臼歯	小臼歯	第2小臼歯
上顎	左右共通	左右共通	
	右		
	左		
下顎	左右共通	左右共通	左右共通
	右		
	左		

#### 3. 原材料

ステンレス鋼

### 【使用目的又は効果】

歯科矯正用

### 【使用方法等】

本品に歯列矯正用チューブ、アタッチメントを溶接又はろう着した後、歯牙に被せ固定する。

### 【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・ご使用前にバンド側面に印字されている部位マークをご確認ください。
- ・万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。
- ・本品を廃棄する場合には、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理ください。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・外圧がかからないように保管すること。
- ・埃、水分等が付かないように保管すること。