

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント (41059000)
歯科矯正用口くう内補助装置

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本品の原材料に対して過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：株式会社 JM Ortho
住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F
電 話 番 号：03-5281-4711
F A X 番 号：03-5281-4716
製 造 業 者：RMO, INC. (アメリカ合衆国)

【形状・構造及び原理等】**

1. 概要

本品は精密な器具で、歯列矯正用ワイヤ又は弧線等に結合させて使用する種類と歯列矯正用帯環にろう着又は溶接させて使用する種類がある。

2. 形状

種類番号	種類名
1	オメガアジャスタブルストップ
2	RM ロック
3	ラグ/クリート
4	バンドシーティングラグ
5	シーティングラグ
6	アイレット
7	クリンパブルフック

・代表形状

オメガアジャスタブルストップ



RM ロック



3. 原材料

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科矯正用

【使用方法等】

形状における種類番号 1)、2)は口腔内に装着されている歯列矯正用ワイヤ等に結合させ、3)~7)は帯環にろう着又は溶接して用いる。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・外圧がかからないように保管すること。
- ・埃、水分等が付かないように保管すること。